

M

STUDIO

Software

MedRx[®]

Studio szoftvertelepítési útmutató





0123

A TÜV SÜD Product Services GmbH

Ridlerstraße 65 • 80339 München • Németország

MedRx

www.medrx-diagnostics.com



1200 Starkey Rd., #105, Largo, FL 33771 USA.

Ingyenes szám: (888) 392-1234 • (727) 584-9600

Fax: (727) 584-9602 • Email: medrx@medrx-diagnostics.com

www.medrx-diagnostics.com

EC REP

A MedRx hivatalos képviselője Európában

DGS Diagnostics A/S

Audiometer Alle 1 • 5500 Middelfart • Dánia

Forgalmazó: MedRx Nemzetközi

c/o MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71, 10553 Berlin, Németország

Tel.: +49 30/70 71 46-50

Fax: +49 30/70 71 46-99

Email: medrx-sales@maico.biz

www.medrx-diagnostics.com



A MedRx Archivált kézikönyvei [a www.medrx-diagnostics.com/support/manuals-studio-software/archive](http://www.medrx-diagnostics.com/support/manuals-studio-software/archive) oldalon érhetők el

Tartalom

Rendszerkövetelmények	4
Szoftvertelepítés.....	5
Eszköz csatlakoztatása.....	7
Hangkártya-beállítások.....	8
Csatlakozás az Adatbázishoz.....	10
Korlátozott garancia	12





Rendszerkövetelmények

MedRx minimális rendszerkövetelmények:

Windows® PC kompatibilis számítógép
Intel™ i5, 2.0 GHz vagy annál jobb
4 GB RAM
20 GB szabad hely a merevlemezen
2.0 szabad USB port
Windows 10 vagy 11 Professional (32 vagy 64 bit)
Kompatibilis a Windows Surface táblagéppel
3.0 USB kompatibilis

MedRx ajánlott számítógépes specifikációk:


Windows® PC számítógép
Intel™ i5 Quad Core vagy annál jobb
8 GB RAM vagy több
Szabad USB 2.0
Grafikus adapter 2 GB dedikált videó memóriával
50 GB vagy több szabad hely a merevlemezen
Nagy sebességű internetkapcsolat
Windows 10 vagy 11 Professional 64 bit
3.0 USB kompatibilis

Szoftvertelepítés




1. Helyezze a MedRx USB Flash meghajtót egy USB portba:

- Nyissa meg a **Sajátgépet**
- Keresse meg az USB meghajtót

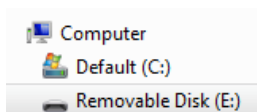

(E :) a választott USB porttól függően változhat.
Olvassa el a számítógép dokumentációját.

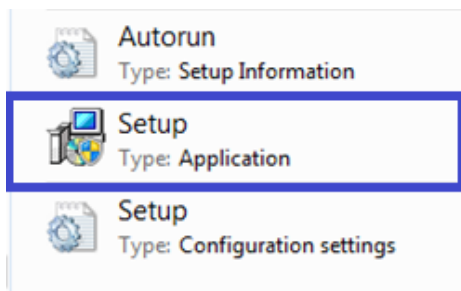


2. Kattintson duplán a **Beállításra** az indításhoz:

MEGJEGYZÉS: Kérésre *fogadja el a szoftver telepítési engedélyét.*




3. A Beállítás képernyőn válassza a **MedRx Studio telepítése** lehetőséget.

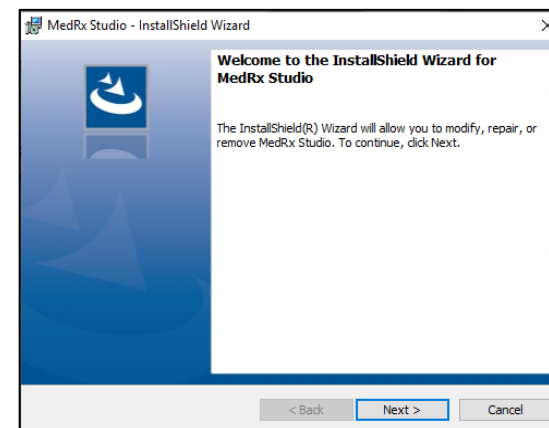


4. Ez az üdvözlő képernyő.


- A folytatáshoz kattintson a **Tovább** gombra.

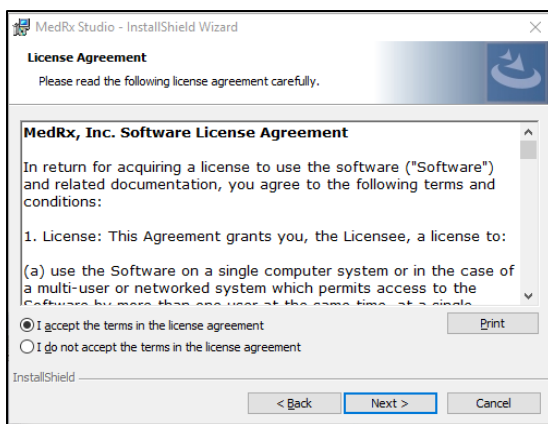


5. Olvassa el a szoftver licencszerződést. Ez a fontos dokumentum határozza meg a Studio szoftver megfelelő használatát.
- A megállapodás elolvasása után válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
 - Kattintson a **Tovább** gombra.

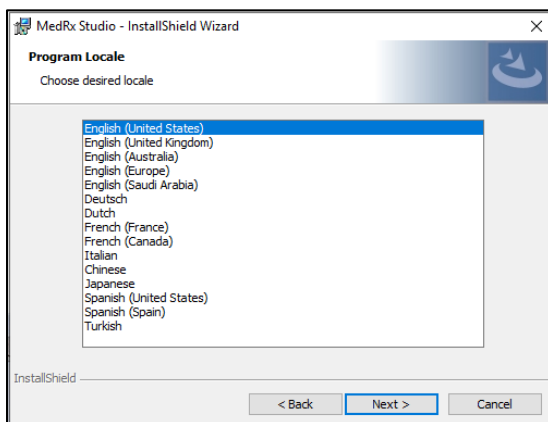


6. Ezen a képernyőn állíthatja be a nyelvet és a tartózkodási helyet.
- Válassza ki a megfelelőt és kattintson a **Tovább** gombra.

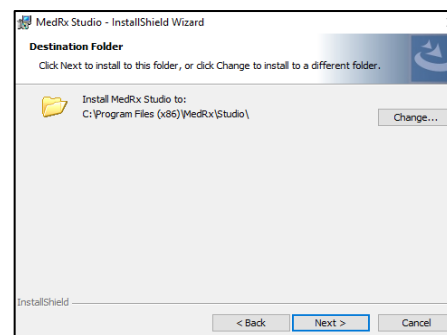


7. Ez a képernyő jelzi a programfájlok helyét. Az alapértelmezett hely javasolt a legtöbb felhasználó számára. Szükség esetén ez a hely megváltoztatható.
- Az alapértelmezett beállításokkal való folytatáshoz kattintson a **Tovább** gombra.
MEGJEGYZÉS: A fájlok helyének a megváltoztatásához (csak a haladó felhasználók és adminisztrátorok részére) kattintson a Váloztozat gombra.

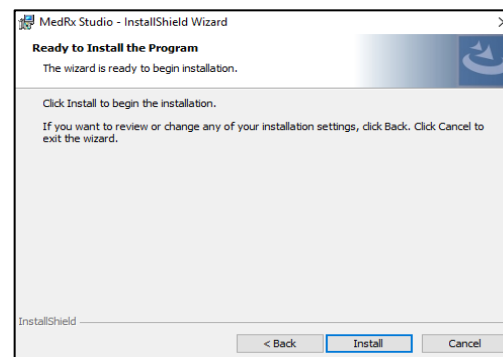

8. A program készen áll a telepítésre.
- A folytatáshoz kattintson a **Telepítés** gombra.
 - Változtatások végrehajtásához kattintson a **Vissza** gombra.

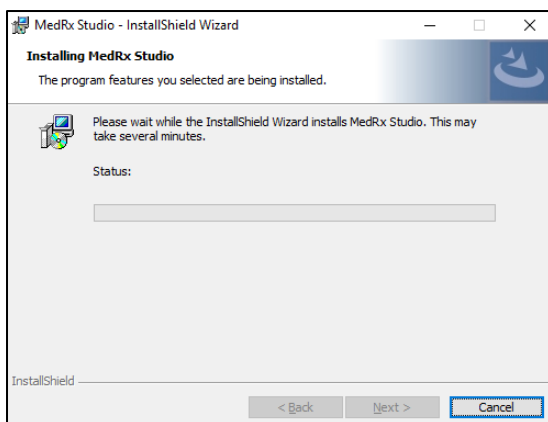

9. A telepítés folyamatban van.

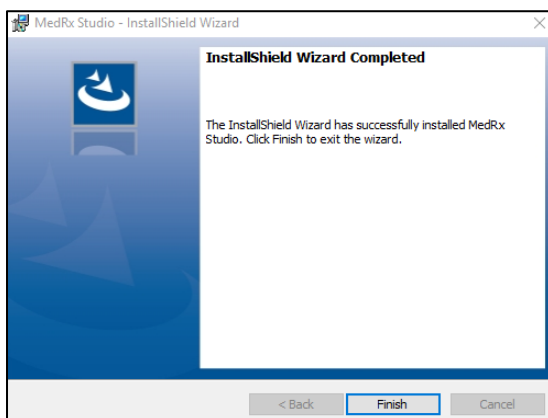

10. Amikor a telepítés befejeződött.


- Kattintson a **Befejezés** gombra.

Eszköz csatlakoztatása


A MedRx termékek USB-tápellátással rendelkeznek.

Csatlakoztassa MedRx eszközének USB kábelét

a számítógépéhez.

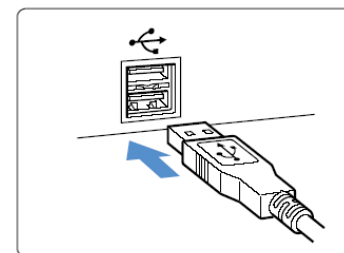

Várjon, amíg a rendszer átmásolja és telepíti az alapértelmezett Windows illesztőprogramokat.

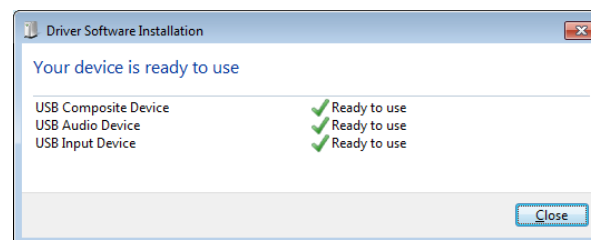

Amikor ez a képernyő megjelenik, és minden eszköz „használatra kész”.


- Kattintson a **Bezárás** gombra.

Hangkártya-beállítások


A következőkben jóvá kell hagynia, vagy be kell állítania a Windows hangkártya alapértelmezett beállításait. Ez az összes MedRx-től eltérő Windows hangot a számítógép belső hangkártyájára irányítja. (Ezek a hangok tartalmazzák az eseményekről szóló értesítéseket, például az új e-maileket és a hibaüzeneteket, valamint a hang és a videó lejátszását.)



1. **Kattintson a jobb egérgombbal** a hangszóró ikonjára a tálcán.

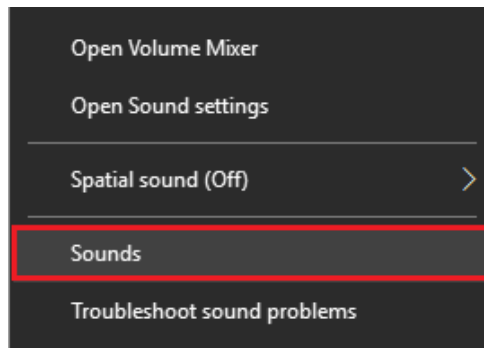


2. Válassza ki a **Hangok** lehetőséget a listából.

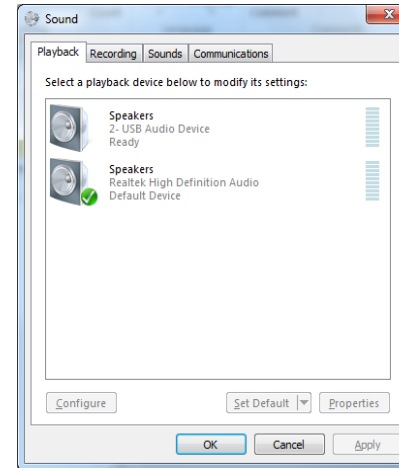

3. A Windows Sound vezérlőpultján, a Lejátszás fülön és a Felvétel fülön ellenőrizze, hogy a MedRx audioeszköz nincs-e alapértelmezés szerint beállítva. Ha ez az alapértelmezett, módosítsa a rendszer (nem MedRx) hangeszközére való kattintással, majd válassza az Alapértelmezés beállítása lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: A számítógép belső hangkártyájának valószínűleg a pillanatképen láthatótól eltérő a neve. A belső hangkártya nevét a számítógép dokumentációjában találja meg, és ennek megfelelően kell beállítania ezt a vezérlőt.

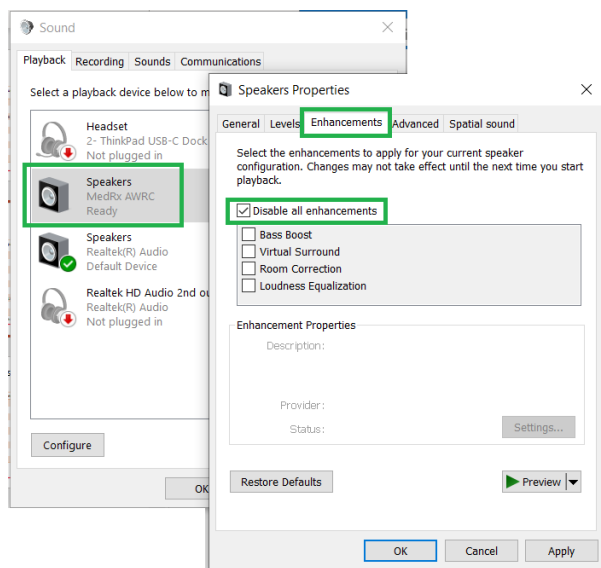

6. Kattintson az **OK** gombra.

Gratulálunk, Ön sikeresen beállította az új MedRx készülékét

4. A Windows Sound vezérlőpultján, a **Lejátszás** fül jobb oldalán kattintson a MedRx eszközre, és válassza a Tulajdonságokat. Navigáljon a **Bővítmények** fülre, és **Kapcsolja ki az összes bővítést**. Ezután kattintson az Alkalmaz és az OK gombra.


Előfordulhat, hogy a bővítmények nem minden számítógépen érhetőek el. Ez nem vonatkozik a hangbővítmények nélküli PC-kre.

5. A Windows Sound vezérlőpultján, a **Felvétel** fül jobb oldalán kattintson a MedRx eszközre, és válassza a Tulajdonságokat. Navigáljon a **Bővítések** fülre, és **Kapcsolja ki az összes bővítést**. Ezután kattintson az Alkalmaz és az OK gombra.


Előfordulhat, hogy a bővítmények nem minden számítógépen érhetőek el. Ez nem vonatkozik a hangbővítmények nélküli PC-kre.

Csatlakozás az Adatbázishoz

A MedRx Studio szoftver futhat a Noah rendszerrel, az OtoAccess-szel, az MS SQL Express-szel vagy adatbázis nélkül.

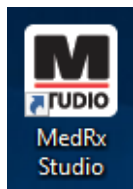


Az adatbázis beállításához kattintson kétszer a MedRx Studio parancsikonra a Windows Asztalon.

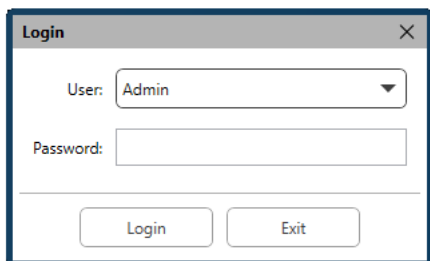

Ha megjelenik a Bejelentkezés ablak, kattintson a Bejelentkezés gombra. A kezdeti telepítéskor nincs beállítva jelszó.



A jobb felső menüsávban kattintson a fogaskerék ikonra.

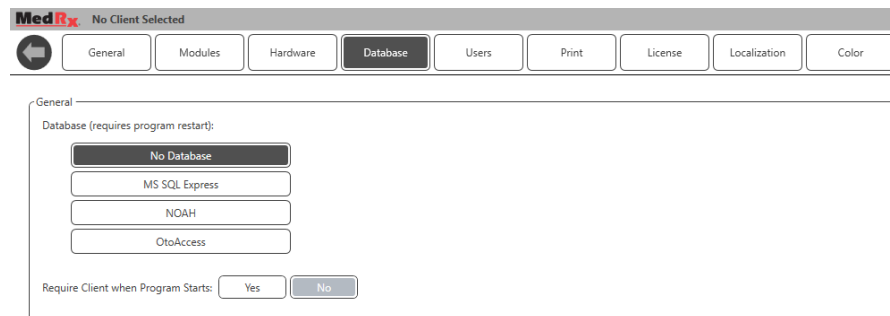

Válassza ki az Adatbázist a fűlek közül. Kattintson a kívánt Adatbázisra. A változtatások alkalmazásához zárja be a MedRx Studio szoftvert.

Megjegyzés: Csak a beállított adatbázisok lesznek láthatók.

Adatbázis beállítása




Adatbázis nélkül

- A Windows Asztalon kattintson duplán a MedRx Studio parancsikonjára.




Noah

- Töltse le és telepítse a Noah-t.
- Indítsa el a Noah programot.
- Válasszon ki egy páciens-t.
- A Noah folyamatainak megfelelően indítsa el a MedRx Studio-t.

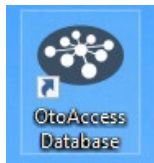

OtoAccess

- Töltse le és telepítse az OtoAccess-t.
- Indítsa el az OtoAccess-t.
- Válasszon ki egy páciens-t.
- Indítsa el a MedRx Studio modult az OtoAccess eljárásait követve.

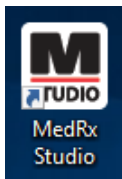


MS SQL Express


- Töltse le és telepítse az MS SQL Express-t.

- Futtassa a MedRx MS SQL adatbázis beállítását.
- A Windows Asztalon kattintson duplán a MedRx Studio parancsikonyjára.

Megjegyzés: A MedRx hozzáférést ad az SQL adatbázis csatlakozásokhoz. Az adatbázis tulajdonosának kell konfigurálnia az adatbázist és a biztonsági mentésekre vonatkozó irányelveket, hogy azok megfeleljenek a helyi szabályozási követelményeknek.

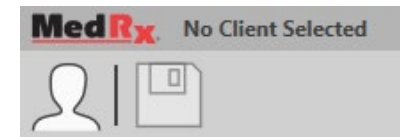

- **Válassza ki a Klientst** a bal felső sarokban.

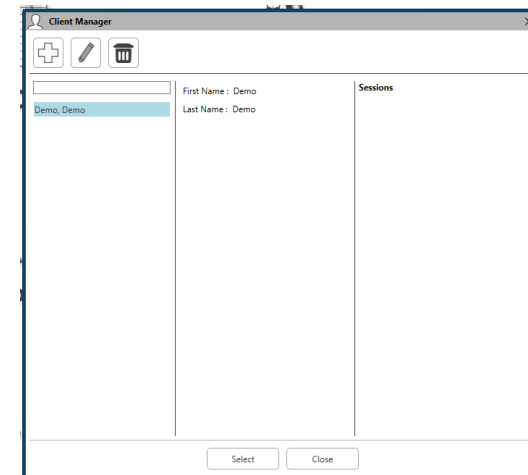

- **+** - Kliens létrehozása.
- **Ceruza** - Kliens létrehozása.
- **Kuka** - Kliens törlése.

Korlátozott garancia

MedRx a vásárlás napjától számított három évig garantálja, hogy ez a termék mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Ha a rendszer működésében a megadott időszakon belül hiba lépne fel, a vásárló felelőssége felkeresni MedRx-et a +49 30 70 71 46 43-as telefonszámon. A gyártó képviselője azt javasolhatja az eszköz tulajdonosának, hogy bizonyos alkatrészeket, vagy a teljes rendszert küldje vissza a következő címre:

MedRx Nemzetközi
c/o MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70-71, 10553 Berlin
Németország

A MAICO megjavít, vagy kicserél minden hibás eszközt, teljes mértékben megvizsgálja a rendszert és/vagy alkatrészeket, majd azt haladéktalanul visszaküldi a tulajdonos részére. Amennyiben a rendszer három éves vagy annál fiatalabb, és nem volt helytelenül használva, megrongálva vagy nem sérült meg, a javítás vagy a visszaküldés nem jár költségekkel. Ilyen kár lehet, de nem kizárólag, az eszköz leejtéséből adódó sérülés, a 38,78 C feletti hőmérsékletnek való kitétség és a víz/folyadék által okozott sérülés.

A rendszer ezen jótállás szerinti javítása vagy cseréje a vevő kizárólagos jogorvoslata. A MedRx nem vállal felelősséget semmilyen következményes vagy véletlen kárért, illetve a kifejezett vagy közvetett jótállás megsértéséért. Kivéve bármilyen, egyéb alkalmazható jogszabály által leírt helyzetet, a termék bármilyen garanciája, forgalmazhatósága vagy alkalmassága a már említett garancia időtartamára korlátozódik.

A MAICO saját belátása szerint szervizel és javítja a garanciális termékeket a vevő kérésére, szükség esetén felszámítva az alkatrészek és a munka költségeit.

A korlátozott jótállás érvénytelennek minősül, ha olyan szoftvert vagy hardvert telepítenek az eszközre, amelyet előzetesen nem hagyott jóvá a MedRx, Inc. A jóváhagyott szoftverek közé tartoznak a Noah és a HIMSA által jóváhagyott, hallókészülékek programozására használt modulok.

A MAICO a nem engedélyezett szoftver vagy hardver telepítéséből eredő hibákért nem vállal felelősséget. Abban az esetben, ha az eszközre telepített nem engedélyezett szoftver vagy hardver problémát okoz, a MedRx az eszközt a beérkezés időpontjában meghatározott díj ellenében szervizeli.