

## Introducción a Amigo Star y el Transmisor FM T5



### Amigo T5

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b> Encender/Apagar    | <b>6</b> LED                    |
| <b>2</b> Indicador de canal | <b>7</b> Pulsador modo silencio |
| <b>3</b> Subir de canal     | <b>8</b> Entrada cargador       |
| <b>4</b> Bajar de canal     | <b>9</b> Entrada AUX            |
| <b>5</b> Micrófono (boom)   | <b>10</b> Entrada micrófono     |

### Amigo Star

- |                                       |
|---------------------------------------|
| <b>1</b> Rueda de C. Volumen          |
| <b>2</b> Indicador LED                |
| <b>3</b> Pulsador búsqueda de canales |



## Usar Amigo Star con el transmisor T5



El transmisor Amigo T5 se sujeta a la ropa.

- 1 Insertar 2 pilas AAA en el transmisor T5 y encenderlo. Se iluminará el indicador LED en rojo.

## Conectar el tubo Corda<sup>2</sup> y el cono a Amigo Star



- 1 **Seleccionar el tubo Corda<sup>2</sup> adecuado.**  
El tamaño del tubo aparece en letras azules (izquierdo) o en letras rojas (derecho) al final del mismo tubo.

La mayoría de los niños utilizarán el tubo más pequeño marcado 0-0.9.

Conectar el tubo a Amigo Star.




- 2 **Seleccionar el cono para Corda<sup>2</sup> adecuado** y conectarlo al tubo. La mayoría de los niños utilizarán el cono más pequeño.



**2** Insertar una pila en el receptor Amigo Star, cerrar el portapilas y girar la rueda de control de volumen para que esté en una posición superior al 1.

**3 Presionar el pulsador búsqueda de canales**  
Este pulsador se utiliza para buscar el canal del Amigo T5. Al encontrar el mismo canal, se ilumina el indicador LED del receptor Amigo Star, indicando que el sistema está preparado para su utilización.


## Colocar Amigo Star en el oído

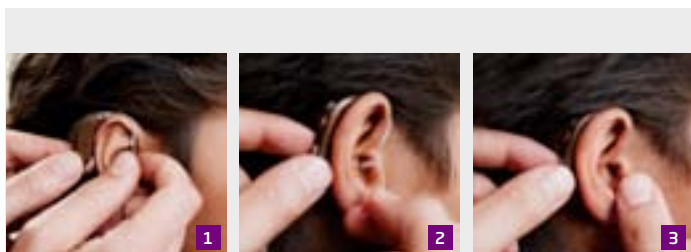

Una vez conectados el tubo Corda2, el cono correcto y está programado, está preparado para colocarse en el oído.

- 1 Colocar Amigo Star detrás de la oreja**
- 2 Posicionar el cono en el canal auditivo y doblar el hilo de sujeción en el pabellón de la oreja**
- 3 Suavemente empuje el tubo fino Corda<sup>2</sup> dentro del oído**

## Llevar el transmisor T5

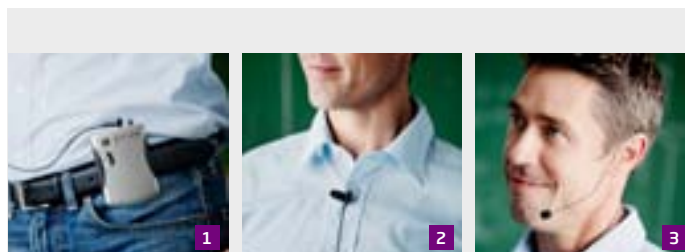

- 1 Sujetar el transmisor T5 con el clip para cinturón.**
- 2 Utilizar el clip del micrófono de solapa para engancharlo a su ropa.** El micrófono debe estar a una distancia de 10-15 cm de la boca (la fuente de sonido).
- 3 Utilizar el micrófono boom**  
El micrófono boom es una alternativa al micrófono de solapa. Se coloca el micrófono alrededor de la oreja y se ajusta el alambre para que el micrófono quede a una distancia de 1 - 5 cm de la boca.

## Problema

Sin alimentación/ el indicador LED del transmisor Amigo no está encendido

Indicador LED del Amigo T5 en verde intermitente

El alumno no oye la señal

El alumno nota interferencias/estática en la señal

## Solución

Revisar, cambiar o cargar la batería

Nota: Amigo T5 admite pilas AA

Indica batería baja - cargar Amigo o insertar pilas AA nuevas

Revisar la conexión del micrófono

¿Está en modo silencio el transmisor Amigo T5 (¿El indicador LED aparece en rojo intermitente?)

¿Está encendido el transmisor Amigo T5? (¿El indicador LED aparece en rojo fijo?)

Revisar el indicador LED de Amigo Star. ¿Aparece en rojo intermitente o fijo?

Limpiar o cambiar el tubo fino Corda<sup>2</sup> y cono de Amigo Star

Verificar que Amigo Star está en el mismo canal que el transmisor T5. Presionar el pulsador búsqueda de canales de Amigo Star para encontrar el canal del transmisor.

Asegurar que el cable del micrófono está conectado correctamente al T5, que no esté ligeramente torcido.

Revisar o cambiar de canal con el botón subir/bajar de canal

Se pueden ajustar funciones adicionales directamente en el receptor Amigo Star, como por ejemplo, deshabilitar la rueda de control de volumen, el pulsador de búsqueda de canales o el indicador LED.

Para acceder a estas funciones, utilizar el programador inalámbrico WRP o los transmisores T30/T31.