


ConnectClip

Guía de inicio rápido

SINCRONIZAR CONNECTCLIP CON LOS AUDÍFONOS


1. **Asegúrese de que el ConnectClip se encuentre apagado.** Mantenga pulsado el botón multifunción durante aproximadamente 6 segundos hasta que el indicador de encendido se encuentre APAGADO. ●

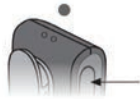

2. **Apague y Encienda ambos audífonos.** (Consulte la guía de instrucciones de uso de su audífono.)

3. **Los audífonos estarán listos** para conectarlos por primera vez con el ConnectClip. Ahora tiene 3 minutos para completar la sincronización.

4. **ENCIENDA el ConnectClip.** Mantenga presionado el botón multifunción durante aproximadamente 3 segundos hasta que el indicador de encendido muestre UNA LUZ VERDE FIJA ●

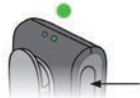

5. **ConnectClip buscará los audífonos.** Indicador de estado AMARILLO INTERMITENTE ●



6. **Acerque el ConnectClip a los dos audífonos** (máxima distancia 20 cm)




7. **El indicador de estado AMARILLO FIJO** indica que se ha establecido la conexión con el audífono o audífonos ●



SINCRONIZAR CONNECTCLIP CON UN TELÉFONO MÓVIL

1. **Sincronice el ConnectClip con sus audífonos antes de sincronizarlo con su teléfono móvil.**

2. **Ponga el ConnectClip en modo sincronización.** Mantenga pulsado el botón multifunción Y el botón subir volumen durante unos 6 segundos (A) hasta que la luz PARPADEA AZUL ●

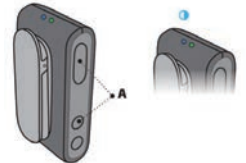

ConnectClip permanecerá en el modo sincronización durante unos 3 minutos.

3. **Active la sincronización en el teléfono móvil.** Encienda el Bluetooth. Busque y conéctese a/sincronice con ConnectClip.



Normalmente está en la sección ajustes/Bluetooth de su teléfono

4. **Introduzca el código pin.** Si su teléfono requiere un código pin, introduzca 0000 (cuatro ceros).

5. **Sincronización completada.** La sincronización completa con el teléfono móvil se indica con la luz AZUL FIJO ●



TRANSFERIR LLAMADAS

Teléfono conectado: Cuando ConnectClip está dentro del alcance de su teléfono móvil, se conectará a él automáticamente. El indicador de la luz es AZUL FIJO ●



Suena el teléfono: Cuando suena el teléfono, oír en sus audífonos un indicador de timbre y, si está disponible, el tono de llamada del teléfono. El indicador de la luz PARPADEA VERDE ●



Responder llamadas: Pulse brevemente el botón multifunción (A), o conteste a la llamada en su teléfono móvil.



Una vez que se conecta la llamada, la luz cambiará a VERDE FIJO ●

Finalizar llamada: Pulse brevemente el botón multifunción (A), o ponga fin a la llamada en su teléfono móvil. Luz AZUL FIJO ●



ESCUCHAR MÚSICA

Si está conectado a un teléfono móvil o sincronizado a otro dispositivo a través de Bluetooth, sus audífonos reproducirán automáticamente la música que escucha en el teléfono/dispositivo. LUZ NARANJA ●

No necesita pulsar ningún botón ni cambiar nada en el ConnectClip.



MICRÓFONO REMOTO

Mantenga pulsado el botón multifunción durante aproximadamente 3 segundos para cambiar el modo. El cambio de modo se confirma mediante una indicación audible en sus audífonos. LUZ MAGENTA ●

Para obtener más información, consulte la "Guía de inicio rápido ConnectClip para el micrófono remoto".



IMPORTANTE: Asegúrese de que el micrófono está apuntando a la boca del interlocutor y que no está cubierto por ropa, bufanda, corbata, etc.

MANDO A DISTANCIA

Cuando ConnectClip no está transmitiendo sonido funciona también como control remoto para sus audífonos.



- **Subir volumen:**
pulsación corta
- **Bajar volumen:**
pulsación corta



- **Siguiente programa:**
mantenga pulsado durante 3 segundos para alcanzar el programa siguiente

- **Silenciar los micrófonos de los audífonos:** pulsación prolongada del botón bajar volumen

Una pulsación corta del botón subir o bajar volumen **activa el sonido**

IMPORTANTE:

Cuando se utiliza como un control remoto, la distancia máxima entre ConnectClip y los audífonos es de 2 metros.

Visión general – patrones de luz de ConnectClip

Estado	Descripción	
●	Luz amarilla intermitente	Buscando audífonos
●	Luz amarilla fija	Audífonos conectados. No conectado a un teléfono móvil.
●	Luz azul intermitente	Buscando un teléfono móvil (sincronizando)
●	Luz azul fija	Conectado a un teléfono móvil
●	Luz verde fija	Llamada en curso
●	Luz verde intermitente	Llamada entrante
●	Luz naranja fija	Música; teléfono móvil
●	Luz magenta fija	Modo micrófono remoto
●	Luz magenta intermitente	Reconectando micrófono remoto

Encendido	Descripción	
●	Luz roja fija	Batería baja
●	Luz verde fija	Encendido – no está cargando
●	Luz verde intermitente	Encendido – cargando
●	Luz verde suave	Encendido – carga completa
●	Luz naranja intermitente	Apagado – cargando
●	Luz naranja fija	Apagado – carga completa