

## INSTRUCCIONES DE USO

PHONE 2.0



## Índice

Utilización del adaptador de teléfono ConnectLine	4
Comparación entre Streamer Pro y Streamer 1.4	5
Cómo recibir llamadas	6
Cómo hacer llamadas	10
Información adicional	13

## Utilización del adaptador de teléfono ConnectLine


El adaptador de teléfono permite hacer y recibir llamadas desde un teléfono fijo. Durante una llamada, los audífonos se utilizan como auriculares. El Streamer (que se lleva colgado del cuello) lleva integrado un micrófono. El conjunto formado por los audífonos y el Streamer funciona, por tanto, como un kit de manos libres.

En primer lugar, verifique que el adaptador de teléfono esté correctamente instalado (ver la guía de instalación). Este manual explica cómo utilizar el Streamer para hablar por teléfono.

Para utilizar el adaptador de teléfono, el Streamer y el adaptador deben estar conectados de forma inalámbrica entre sí. Esta conexión se efectúa automáticamente, siempre y cuando el Streamer y el adaptador de teléfono estén emparejados y dentro de alcance (ver la sección "Alcance" en la página 13). El indicador del adaptador de teléfono se ilumina en azul 🟦 para confirmar que está conectado al Streamer.

## Comparación entre Streamer Pro y Streamer 1.4

El gráfico de abajo muestra las diferencias principales entre el Streamer 1.4 y el nuevo Streamer Pro. Si desea más información, consulte: [www.oticon.com/connectline](http://www.oticon.com/connectline)

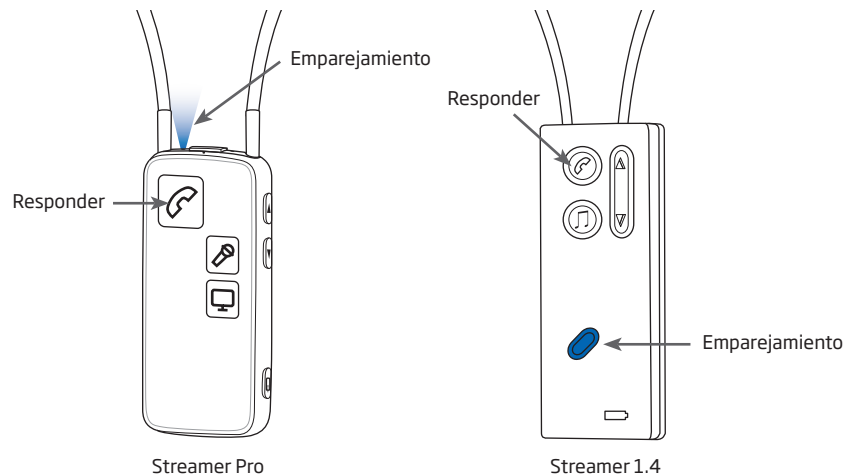

## Cómo recibir llamadas


### Cómo contestar a una llamada y cómo finalizarla

Compruebe que el micrófono del Streamer esté hacia arriba.

Cuando suene su teléfono fijo, usted escuchará un aviso de llamada entrante en sus audífonos. Al mismo tiempo, el indicador de teléfono del Streamer y el indicador de estado se iluminarán en verde intermitente. El indicador del adaptador de teléfono también parpadeará en verde.

**Pulse brevemente el botón de teléfono del Streamer (A)** para atender la llamada. Escuchará un aviso de confirmación en sus audífonos. El botón de teléfono y el indicador de estado del Streamer se quedarán encendidos en verde fijo. El indicador del adaptador de teléfono también se quedará fijo en verde.

Para colgar, pulse brevemente el botón de teléfono del Streamer. La luz verde del botón de teléfono se apagará.

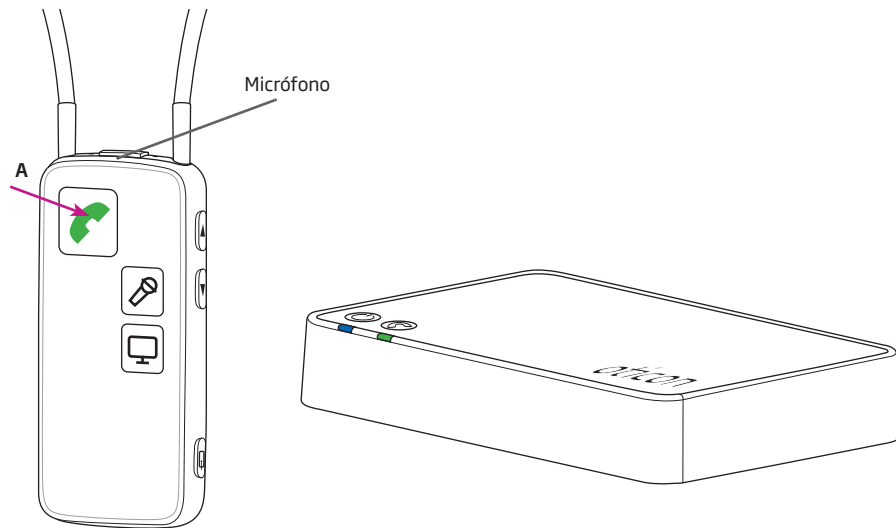

Recibir una llamada			
Estado del indicador superior del Streamer Pro	Frontal del Streamer Pro	Adaptador de teléfono	Descripción
			El Streamer y el adaptador de teléfono están conectados.
			El teléfono suena: el indicador de estado de la parte superior del Streamer y el botón de teléfono parpadean en verde. Escuchará un aviso de llamada entrante en sus audífonos.
			Cuando acepte la llamada, escuchará un tono de confirmación, para que sepa que está atendiendo la llamada. Inmediatamente, podrá hablar y escuchar a su interlocutor.

Fijo Intermitente

## Cómo hacer llamadas

### Cómo hacer una llamada


Compruebe que el micrófono del Streamer esté hacia arriba.

1. Para hacer una llamada, **pulse brevemente el botón del Streamer (A)**. Oirá en los audífonos un tono continuo, que indica que puede marcar el número. El botón de teléfono del Streamer y el indicador del adaptador de teléfono se iluminarán en verde fijo.
2. **Descuelgue el auricular** del teléfono fijo (o, en caso de un teléfono fijo inalámbrico, pulse el botón de llamada). A continuación, **marque el número (B)** de forma normal para hacer una llamada.
3. En unos instantes escuchará en sus audífonos el tono de llamada, lo cual le indica que la llamada se le ha transferido al Streamer y los audífonos.

Ahora, puede **colgar el auricular del teléfono fijo** (o pulsar el botón "finalizar llamada" en el fijo inalámbrico).

Para colgar, pulse brevemente el botón de teléfono del Streamer.

\* Nota: Asegúrese de colgar correctamente el teléfono fijo; de lo contrario, la línea dará comunicando y no podrá recibir llamadas.

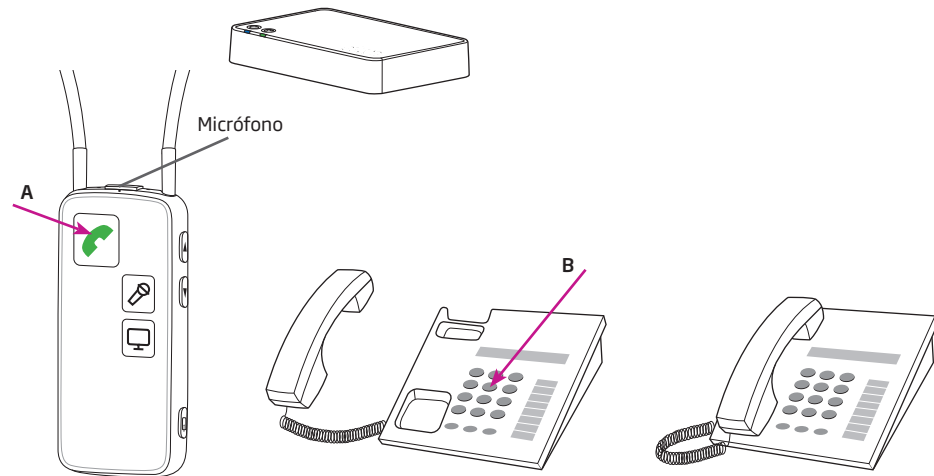

Cómo hacer una llamada			
Estado del indicador superior del Streamer Pro	Frontal del Streamer Pro	Adaptador de teléfono	Descripción
			El Streamer y el adaptador de teléfono están conectados.
			Pulse brevemente el botón de teléfono del Streamer. Escuchará el tono de marcación en los audífonos. (1)

Fijo Intermitente

## Información adicional

### Apagar el adaptador de teléfono

Si no desea recibir llamadas de teléfono en su Streamer, apague el adaptador de teléfono pulsando el botón encender/apagar. En condiciones normales de uso, el adaptador de teléfono consume muy poco. No es necesario apagarlo.

### Alcance

El adaptador de teléfono tiene un alcance de unos 30 metros (con respecto al Streamer Pro), dependiendo de las paredes y el mobiliario del lugar. Dentro de este alcance, es posible hablar por teléfono en modo manos libres con buena calidad de sonido (es decir, sin ruido en la línea).

En general, el aviso de llamada entrante se escucha a distancias de hasta 30 o 40 metros, pero es preciso acercarse un poco al adaptador de teléfono para escuchar con claridad la voz de la persona que le llama. Tenga esto en cuenta, por ejemplo, si le entra una llamada mientras trabaja en el jardín.

### **Control de volumen**

Utilice los botones de volumen del Streamer para ajustar el nivel de volumen del teléfono en los audífonos. Para ajustar el volumen, presione brevemente los botones de subir volumen o de bajar volumen. Para subir o bajar más el volumen, pulse varias veces los botones correspondientes.

El Streamer memoriza el nivel de volumen que usted selecciona y lo utiliza en la siguiente llamada telefónica.

### **Para escuchar únicamente el sonido del teléfono**

Cuando se utiliza por primera vez la solución de teléfono, los micrófonos de los audífonos están activos de forma predeterminada.

Si lo desea, es posible silenciar los micrófonos de los audífonos. De este modo, oirá mejor la conversación telefónica. Para silenciar los micrófonos, haga lo siguiente: en el caso del Streamer Pro, mantenga pulsados simultáneamente durante 1 segundo los botones subir volumen y bajar volumen; en el caso del Streamer, mantenga pulsado el botón subir volumen o el botón bajar volumen durante 2 segundos.

Si durante la conversación, vuelve a pulsar el botón de volumen durante 2 segundos (en el caso del Streamer 1.4), o si pulsa brevemente el botón subir volumen o el botón bajar volumen (Streamer Pro), se reactivan los micrófonos del audífono.

Si desea instrucciones más detalladas sobre el manejo del Streamer, consulte el manual de usuario del Streamer.

Para más información y sugerencias, consulte la información en línea sobre ConnectLine en [www.oticon.com/phone](http://www.oticon.com/phone).