

# El pequeño y poderoso ConnectLine Microphone

Ligero y discreto, el nuevo  
ConnectLine Microphone ayuda a los  
niños a estar mejor conectados con  
su familia y amigos.



ConnectLine Streamer

Hasta 15 metros



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
ConnectLine  
Microphone



**Seguridad absoluta.** Con el Streamer y el micrófono  
ConnectLine, los niños podrán oírle incluso aunque se  
alejen de usted y les distraigan otros sonidos.

**child  
friendly  
hearing  
care**

Para ayudar a los niños con problemas de audición a desarrollar todo su potencial hace falta un planteamiento absolutamente especializado. Por eso, ofrecemos las soluciones y servicios que los profesionales y cuidadores necesitan para proporcionar a los niños todas las oportunidades que se merecen. Esto es lo que ofrece nuestro programa pediátrico.



118077ES/07.11 Printed on 100% recycled paper

Oticon | **ConnectLine**

Más facilidad para estar  
conectado con la familia, los  
amigos y... la diversión



**child  
friendly  
hearing  
care**

**PRESENTAMOS**

ConnectLine Microphone


[www.oticonchildren.com](http://www.oticonchildren.com)

**oticon**  
PAEDIATRICS

**oticon**  
PAEDIATRICS

# ¡Oticon ConnectLine hace la vida más fácil!

Los niños y los adolescentes necesitan sentirse conectados; no sólo a las demás personas, sino también a su entorno. Quieren hablar con sus amigos por teléfono o cara a cara, escuchar música, ver películas y jugar con sus videoconsolas. La mayoría de los niños pueden hacer todo eso casi sin pensarlo. Sin embargo, para los que tienen una pérdida de audición, estas actividades pueden ser todo un reto.

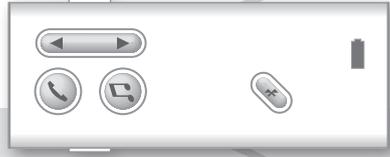

## Oportunidades para ser como los demás

El sistema ConnectLine de Oticon está diseñado para facilitar el uso de teléfonos, televisores, ordenadores y reproductores de música a los niños con audífonos. El micrófono ConnectLine está diseñado para mantener la atención del niño en situaciones ruidosas, haciendo que la voz de su interlocutor destaque más claramente sobre el ruido de fondo, facilitando enormemente la comprensión en conversaciones cara a cara.

## ConnectLine: un sistema inalámbrico adaptado a TODAS las necesidades de su hijo

Los distintos elementos del sistema ConnectLine -el Streamer, los adaptadores de televisión y teléfono, el cable de audio y el micrófono- abren nuevas posibilidades de comunicación y entretenimiento para niños y adolescentes.

Al igual que las demás soluciones de Oticon, el sistema ConnectLine está diseñado para ayudar a su hijo a comunicarse libremente, relacionarse con naturalidad y participar de forma más activa.

| Televisión

| Teléfono

| Móvil

| Ordenador

| Música

| Micrófono

### Seguir la acción

El **adaptador de televisión ConnectLine** es un accesorio ligero que se conecta al televisor y envía todos los detalles del sonido directamente a los audífonos del niño. Entenderán los chistes, seguirán la acción y disfrutarán al máximo viendo sus películas y programas favoritos. El adaptador de televisión tiene unas dimensiones de 7,6 x 7,6 x 1,5 centímetros.

### Mantenerse en contacto

El **adaptador de teléfono ConnectLine** se conecta fácilmente a un teléfono fijo y envía la voz de la persona que llama directamente al Streamer, que lo transmite a LOS DOS audífonos, todo de forma inalámbrica. Cada vez que suene el teléfono, su hijo podrá oírlo. Además, como este sistema reduce al mínimo los silbidos y la distorsión, a los niños les resulta más cómodo escuchar lo que les dicen sus amigos o sus abuelos. ¡Y pueden hacer todo eso sin necesidad de tener el teléfono en la mano! El adaptador de teléfono tiene unas dimensiones de 7,6 x 7,6 x 2,5 centímetros.

### Movilidad

El **ConnectLine Streamer** es un accesorio de línea muy esbelto diseñado para ayudar a su hijo a realizar y recibir llamadas por el móvil, dentro y fuera de casa, con menos complicaciones

y de forma más cómoda. Sólo hay que pulsar un botón para convertir los audífonos en un teléfono de manos libres.

El Streamer también sirve como mando a distancia para cambiar del sonido de la televisión al del teléfono, y para controlar el volumen de los audífonos del niño.

### Conectarse a la música

En lugar de quitarse los audífonos para ponerse unos cascos, ¿por qué no escuchar música utilizando un discreto cable entre el Streamer y cualquier reproductor de mp3? También es posible conectar el Streamer a un ordenador, para disfrutar de todos los efectos sonoros de los videojuegos o de la navegación por Internet.

### Comunicación más sencilla

El pequeño **ConnectLine Microphone** capta la voz de la persona que lo lleva, atenúa el ruido de ambiente y envía la señal directamente al Streamer del niño... ¡que puede estar a una distancia de hasta 15 metros! ConnectLine Microphone proporciona un sonido más directo, con el que su hijo podrá comunicarse con mayor claridad en más situaciones de interacción individual que nunca. El micrófono ConnectLine mide apenas 4,5 centímetros de altura.



# ConnectLine Microphone ayuda a vencer el ruido y la distancia

En el coche, en un restaurante, de compras... En cualquier situación en la que a su hijo le resulte difícil oírle a causa del ruido o la distancia, el micrófono ConnectLine facilita la comunicación tú a tú.

Es ideal para niños a partir de 5 años y consiste en un micrófono de solapa que envía la voz de la persona que lo lleva a los audífonos del niño. De este modo, ambos pueden relajarse y sentirse más seguros.



El niño recibe un sonido más claro y de mejor calidad cuando se encuentra en lugares ruidosos, y los padres pueden dedicarle la atención justa, sin necesidad de estar exageradamente pendientes de él. El niño no depende tanto de los demás para saber lo que ocurre a su alrededor. Puede ser un individuo más independiente: ¡exactamente lo que desea!

## Funcionamiento de ConnectLine Microphone

El uso de ConnectLine Microphone no puede ser más sencillo. Lo único que hay que hacer es prenderlo en la ropa.

### Transmisión del sonido entre usted y su hijo:

- A: El micrófono capta su voz
- B: Un segundo micrófono interno capta los sonidos circundantes y reduce el ruido de fondo, evitando interferencias con la señal de su voz.
- C: Su voz se transmite claramente al Streamer del niño.
- D: El Streamer transmite la señal directamente a los audífonos Oticon de su hijo.

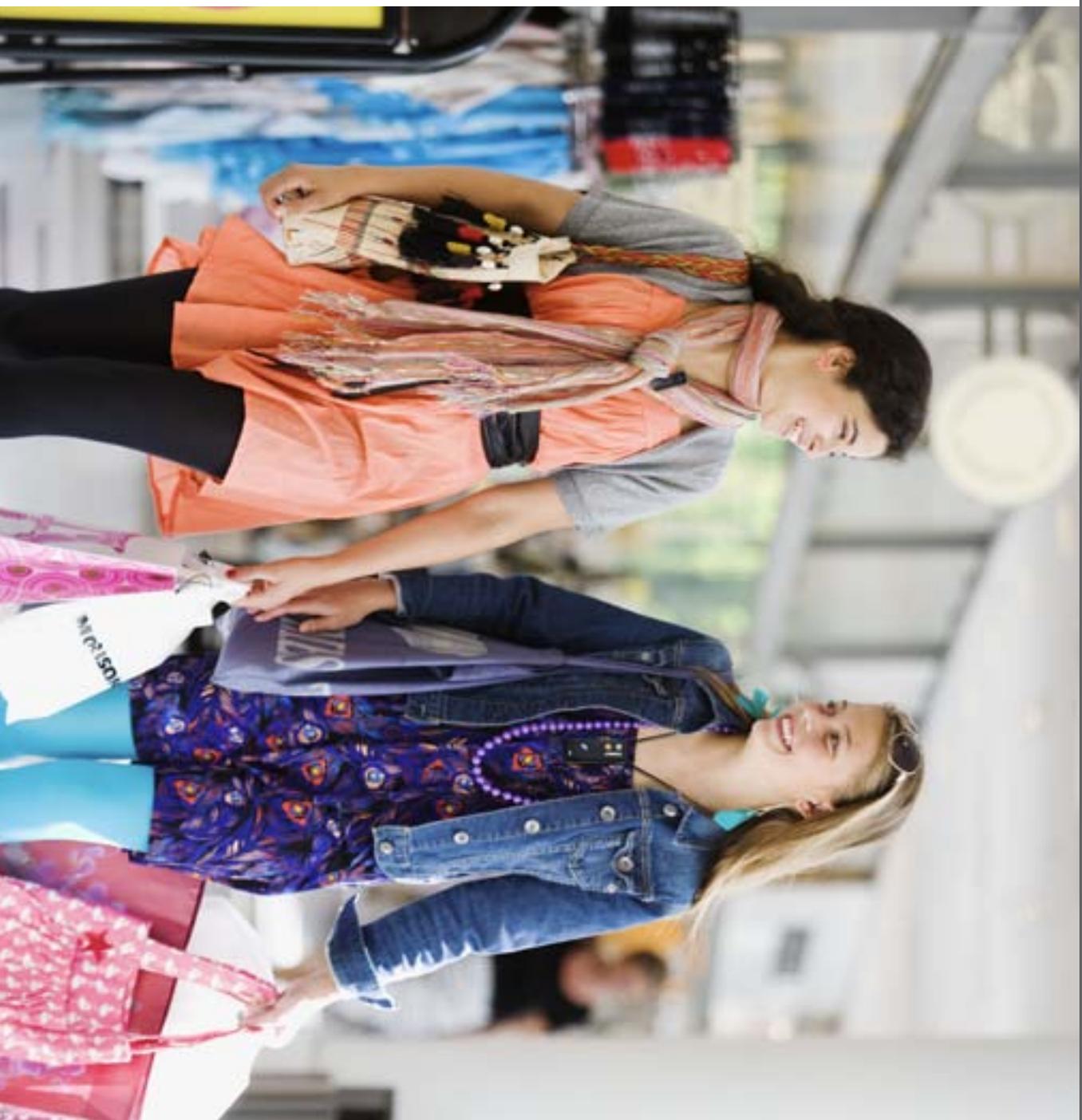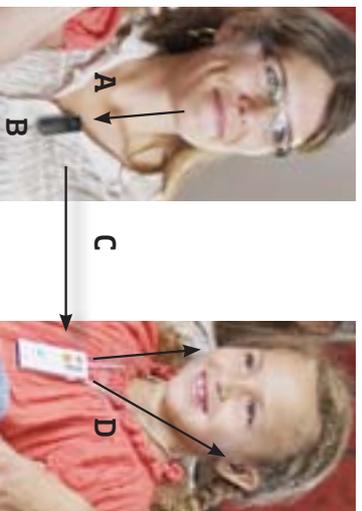

## ¿En qué situaciones supone una diferencia?

Queremos poder hablar con nuestros hijos mientras preparamos la cena y ellos ven la televisión. También queremos tener la seguridad de que, cuando estamos en un parque o en un centro comercial, ellos nos oyen con claridad. Los niños son impulsivos: no queremos que crucen la calle corriendo ni que vayan por donde no deben y se pierdan. ConnectLine Microphone puede suponer la diferencia entre perder el contacto o tener contacto inmediato.

Y cuando hablamos de vida social, los adolescentes quieren ir adonde está la acción. Si van con un amigo y el amigo lleva puesto el micrófono, pueden ir charlando y de paso, sentirse más seguros en las situaciones de grupo. Si el que se pone el micrófono es el entrenador, el niño puede responder más rápido a sus instrucciones, en una cancha, en un gimnasio o sobre un escenario.



## Ventajas de ConnectLine Microphone, en pocas palabras:

- Conectividad extremadamente sencilla: sólo hay que pulsar un botón para conectar el micrófono de forma inalámbrica al Streamer
- Fácil de llevar en la solapa
- Conexión Bluetooth consistente y totalmente privada, con un alcance de 15 metros
- Reducción del ruido para que la voz del hablante destaque con más claridad
- Conectividad rentable
- Diseño discreto, contemporáneo e intuitivo
- Fácil de cargar para una autonomía de 5 horas

## Con el Streamer de ConnectLine los niños tienen el control




El **STREAMER** constituye el núcleo del sistema y permite a su hijo controlar todos los dispositivos ConnectLine con los que esté emparejado. El niño puede cambiar fácilmente la recepción de sonido de la televisión al teléfono o a un reproductor de música, con sólo pulsar un botón.



## Dakota disfruta del manos libres

“Me encanta tener el Streamer porque puedo escuchar el iPod sin tener que quitarme los audífonos; también puedo llamar a mis amigos sin necesidad de ponerme el móvil al oído”.

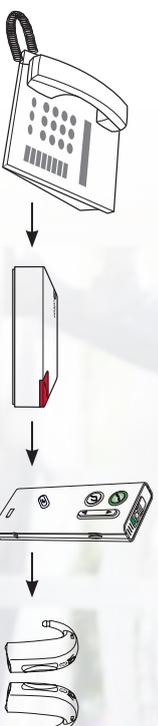

Conectividad instantánea entre el teléfono fijo de casa y los audífonos Oticon del niño, a través del adaptador de teléfono ConnectLine y el Streamer.

