

Documento de orientación sobre el Covid-19

Limpieza de
micrófonos remotos
Oticon



Guía para la limpieza de micrófonos remotos Oticon

Este es un documento de orientación para la limpieza de micrófonos remotos Oticon en relación con el Covid-19. Se aplica a los sistemas de micrófono remoto Oticon Amigo, ConnectClip y EduMic. Se recomienda la limpieza cuando se comparte un transmisor de micrófono remoto Oticon entre diferentes usuarios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el coronavirus es un virus respiratorio que puede transmitirse de una persona infectada principalmente a través de gotas generadas al toser o estornudar, o por gotas de saliva o secreción nasal. También puede ser transmitido por aquellos que no muestran síntomas. Por lo tanto, varios usuarios de un transmisor de micrófono remoto deben tener especial cuidado.

Se recomienda limpiar los micrófonos remotos entre cada uso individual.

Guía para la limpieza de micrófonos remotos Oticon

- Use guantes cuando limpie el transmisor de micrófono remoto Oticon.
- La mayoría de los tipos de toallitas húmedas desinfectantes comerciales se pueden usar para limpiar el transmisor de micrófono remoto.
- Los que son desinfectantes a base de agua son óptimos; se puede usar una solución de isopropanol al 70%. No se deben usar desinfectantes para manos.
- Limpie toda la superficie del transmisor de micrófono remoto con la toallita/toalla desinfectante húmeda.
- Tenga cuidado de evitar tocar directamente las aberturas del micrófono con exceso de líquido. La toallita húmeda es la mejor.
- Después de la limpieza, deseche los guantes y las toallitas/toalla; lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón o desinfecte con un desinfectante de alcohol adecuado.
- Deje secar el transmisor de micrófono remoto durante aproximadamente unos minutos.

Póngase en contacto con su representante de Oticon si tiene alguna pregunta.

www.oticon.com

