

Consejos importantes para limpiar audífonos

Manipulación segura de productos Oticon en respuesta al COVID-19

La limpieza y el mantenimiento de los audífonos es una parte importante para apoyar a sus pacientes. Debido al Coronavirus, hemos actualizado nuestras pautas sobre cómo limpiar de manera segura y efectiva los audífonos.

Comparta estos pasos importantes con el personal y los pacientes:

- Use guantes cuando limpie los audífonos
- Cuando manipule **audífonos retroauriculares**, limpie la superficie del audífono con toallitas húmedas que no contengan alcohol. Esto se debe a que cuentan con un recubrimiento hidrófobo que es sensible al alcohol.
- Para los **audífonos intrauriculares**, se pueden usar todo tipo de toallitas húmedas para limpiar la superficie de los audífonos.
- Una alternativa a las toallitas húmedas es limpiar con una **solución de jabón suave sobre un paño de algodón exprimido**. Evite usar un exceso de agua que pueda ingresar a los audífonos.
- Después de la limpieza, deseche los guantes y lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón o con un desinfectante con alcohol adecuado.
- Deje que sus audífonos limpios se sequen durante unos minutos.

Recientemente actualizamos nuestras políticas para ayudarle a usted y a sus pacientes durante este momento difícil. Para más información, visite nuestra nueva página web www.oticon.com/practice-support o póngase en contacto con nosotros si tiene dudas al **800 526 3921**.

Seguridad ante el COVID-19

En Oticon, apoyamos plenamente a las autoridades sanitarias para minimizar la propagación del coronavirus y estamos siguiendo las directrices de las autoridades locales. Nuestras instalaciones de producción de Oticon cumplen con todas las directrices de CDC y OSHA con respecto al COVID-19, incluidos, entre otros, protocolos adecuados para el distanciamiento social y la desinfección.