

miniRITE

Alta2
Nera2
Ria2



Instruções de uso

oticon
PEOPLE FIRST

Visão Geral dos Modelos

Esse livreto é válido para Oticon miniRITE e os seguintes modelos e famílias de aparelhos auditivos:

- Alta2 Pro
- Alta2
- Nera2 Pro
- Nera2
- Ria2 Pro
- Ria2

Os seguintes receptores estão disponíveis para os modelos acima:

- Receptor 60
- Receptor 85
- Receptor 100
- Molde Flex Power receptor 100
- Molde Flex Power receptor 105

Introdução para este livreto

Este livreto lhe orienta sobre como usar e manter o seu novo aparelho auditivo. Leia o livreto cuidadosamente, incluindo a **seção Aviso**. Isso vai ajudá-lo a alcançar todo o benefício do seu novo aparelho auditivo.

Seu fonoaudiólogo ajustou o aparelho auditivo para se adequar às suas necessidades. Se tiver perguntas adicionais, entre em contato com seu fonoaudiólogo.

| **Sobre** | [Início](#) | [Manuseio](#) | [Opções](#) | [Avisos](#) | [Mais informações](#) |

Para a sua conveniência, este livreto contém uma barra de navegação para ajudá-lo a navegar facilmente pelas diferentes seções.

Indicação de uso

O aparelho auditivo foi concebido para amplificar e transmitir sons para o ouvido e, com isso, compensar a deficiência em uma perda auditiva de leve até severa-profunda. O aparelho auditivo foi concebido para uso em adultos e crianças maiores que 36 meses.

AVISO IMPORTANTE

A amplificação do aparelho auditivo é exclusivamente ajustada e otimizada para as suas capacidades auditivas pessoais durante o ajuste do aparelho executado pelo seu fonoaudiólogo.

Índice 1/2

Sobre

Identifique o receptor e o adaptador do seu aparelho auditivo	10
miniRITE	12
Identificando o aparelho esquerdo e direito	14
Bateria	15

Início

Ligando e desligando o aparelho auditivo	16
Quando substituir uma bateria	17
Substituindo a bateria	18

Manuseio

Cuidando do seu aparelho auditivo	20
Ferramenta Multiuso para manusear baterias e para limpeza	21
Colocando o aparelho	22
Adaptadores padrão: Domo ou Grip Tip	24
Substitua o domo ou Grip Tip	25
Filtro ProWax miniFit	26

Trocando o filtro ProWax miniFit	27
Adaptadores personalizados: Micro Molde, LiteTip ou Molde Flex Power	28
Limpeza do Micro Molde, LiteTip ou Molde Flex Power	29
Substituição do filtro ProWax	30

Opções

Recursos e acessórios opcionais	32
Colocando o aparelho auditivo no mudo	33
Mudando os programas	34
Mudando o volume	36
Gaveta resistente de bateria	38
Dispositivos Auxiliares sem fio	40
Outras opções	41

Avisos

Avisos	42
--------	----

Índice 2/2

Mais informações


Guia de solução de problemas	48
Resistência à água	50
Condições de uso	51
Certificado de garantia	52
Garantia internacional	53
Informações técnicas	54
Informações Gerais	62

Identifique o receptor e o adaptador do seu aparelho auditivo

Isso vai facilitar que você navegue através deste livreto.


Receptores

Os aparelhos auditivos usam um dos seguintes receptores:

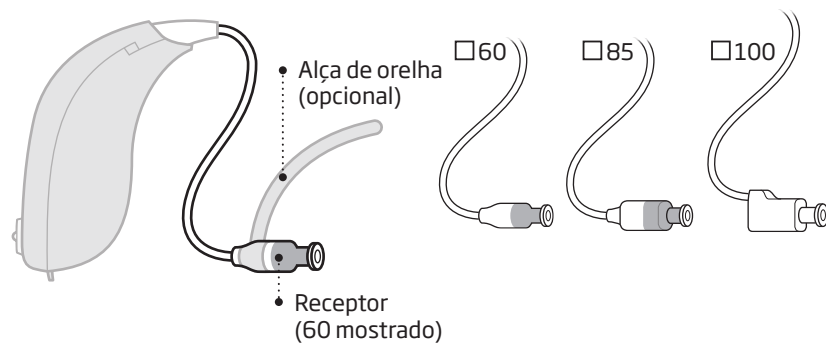

Adaptadores

Um RITE terá um dos seguintes adaptadores.

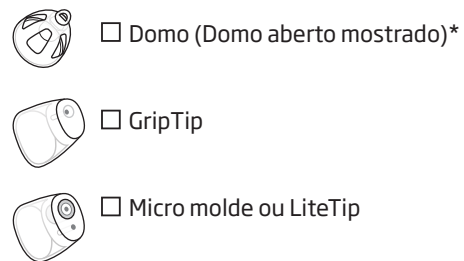


Receptor molde power




* Consulte os detalhes para a substituição do domo ou Grip Tip na seção: Substitua o domo ou GripTip

miniRITE

O que é isso

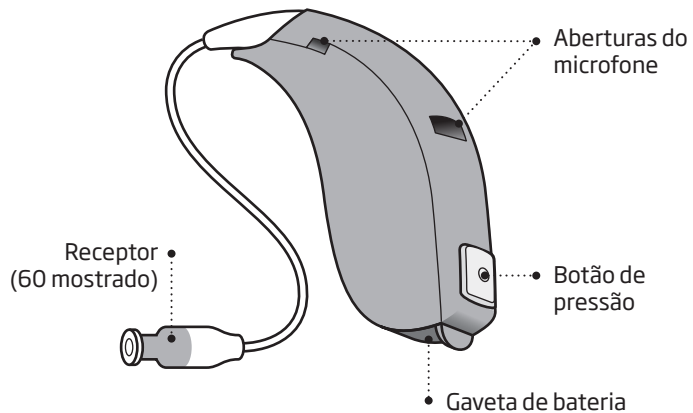


O que ele faz

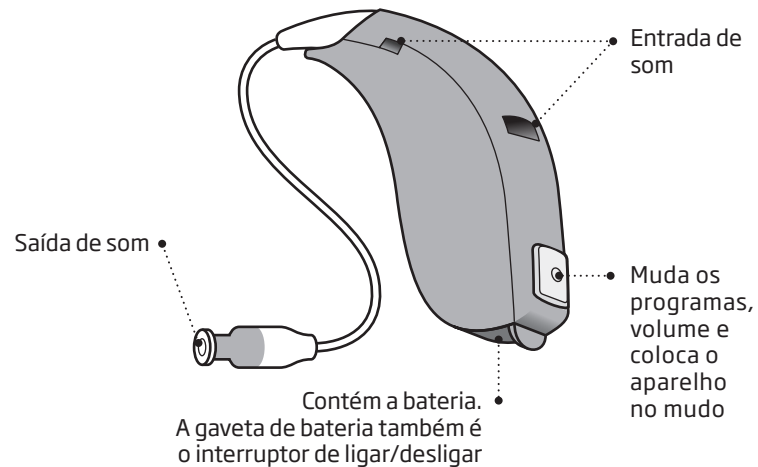

Identificando o aparelho esquerdo e direito


É importante distinguir se o aparelho auditivo ficará no lado esquerdo ou direito, pois eles podem ser programados de forma diferente.

Os indicadores coloridos referentes ao lado esquerdo/direito se encontram na gaveta da bateria e nos receptores 60 e 85, como exibido. Indicadores também podem ser encontrados nos receptores 100 e em alguns adaptadores.

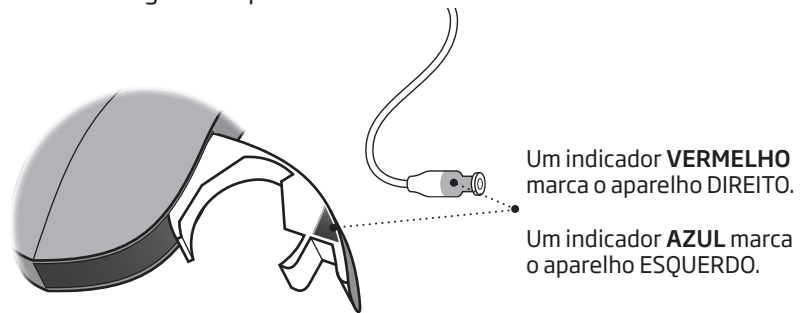

Bateria

Seu aparelho auditivo é um dispositivo eletrônico em miniatura que funciona com baterias especiais. Para ativar o aparelho auditivo, você deve inserir uma bateria nova na gaveta de bateria. Veja como na seção "Substituindo a bateria".

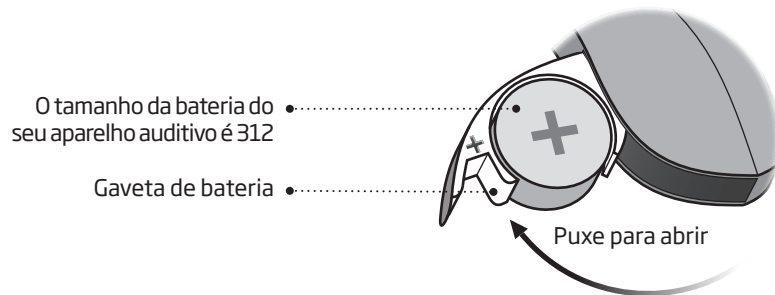


Ligando e desligando o aparelho auditivo

A gaveta de bateria também é usada para ligar e desligar o aparelho auditivo. Para preservar a bateria, certifique-se de que o seu aparelho esteja desligado quando você não o estiver usando.


Ligar

Feche a gaveta de bateria com a bateria no local.

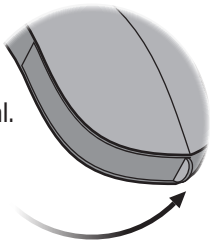

Desligar

Abra a gaveta de bateria

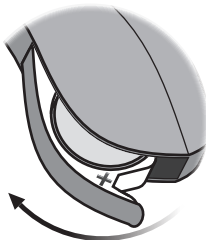

Quando substituir uma bateria

Quando for hora de substituir a bateria, você ouvirá dois bipes repetidamente em intervalos moderados até a bateria se esgotar.



Dois bipes
= A bateria está fraca



Quatro bipes
= A bateria está esgotada


Dica de manutenção da bateria

Para garantir que o aparelho auditivo sempre funcione, traga baterias sobressalentes com você, ou substitua a bateria antes de sair de casa.

Nota: As baterias precisam ser substituídas mais frequentemente se você estiver transmitindo áudio ou música para os seus aparelhos auditivos.


Substituindo a bateria

1. Remover

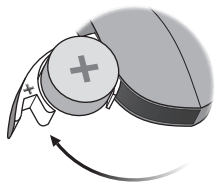

Abra completamente a gaveta de bateria. Remova a bateria.


2. Preparar

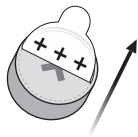

Remova a etiqueta adesiva do lado + da nova bateria.


Dica:
Espere 2 minutos de forma que a bateria extraia o ar, assegurando sua funcionalidade ideal.

3. Inserir

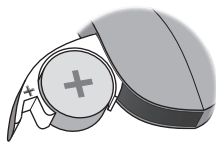


Coloque a nova bateria na gaveta de bateria. Certifique-se de que o lado + fica para cima.

4. Fechar

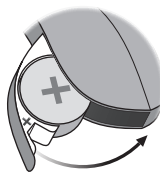

Feche a gaveta de bateria. O aparelho tocará um jingle pelo adaptador. Coloque o adaptador perto do seu ouvido para ouvir o jingle.

Dica

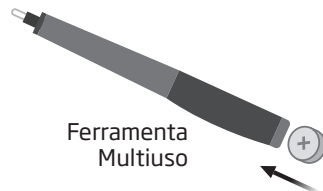

Ferramenta Multiuso

A Ferramenta Multiuso pode ser usada para trocar a bateria. Use a extremidade magnética para remover e inserir baterias.


A Ferramenta Multiuso pode ser encontrada com seu fonoaudiólogo.

Cuidando do seu aparelho auditivo

Ao manusear o seu aparelho auditivo, mantenha-o sobre uma superfície macia para evitar danificá-lo caso ele caia.

Limpe as aberturas do microfone

Escove cuidadosamente sujeiras das aberturas. Escove delicadamente a superfície. Certifique-se de que a escova esteja limpa e que ela não seja pressionada contra as aberturas.

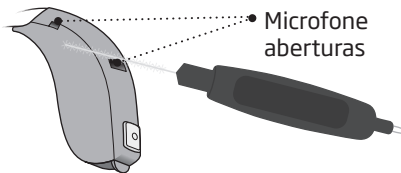


AVISO IMPORTANTE

Use um pano macio e seco para limpar o aparelho auditivo. Ele nunca deve ser lavado ou imerso em água ou outros líquidos.

Ferramenta Multiuso para manusear baterias e para limpeza

A ferramenta contém um ímã que torna mais fácil substituir a bateria do aparelho auditivo. Ele também contém uma escova e um loop de fios para limpeza e remoção do cerúmen. Se você precisa de uma nova Multiuso, entre em contato seu fonoaudiólogo.

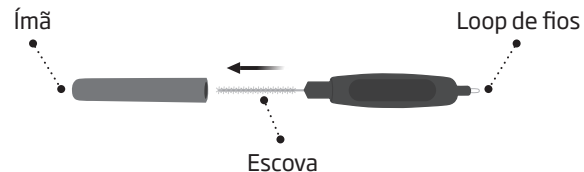


AVISO IMPORTANTE

A ferramenta tem um ímã embutido. Mantenha a 30 cm de distância de cartões de crédito e outros dispositivos magneticamente sensíveis.

Colocando o aparelho

O receptor leva o som para seu ouvido. O receptor sempre deve ser usado com um adaptador acoplado. Apenas use peças desenvolvidas para o seu aparelho auditivo.

Se o aparelho tiver uma alça, coloque-a na orelha para que siga o contorno da orelha (veja o passo 3).

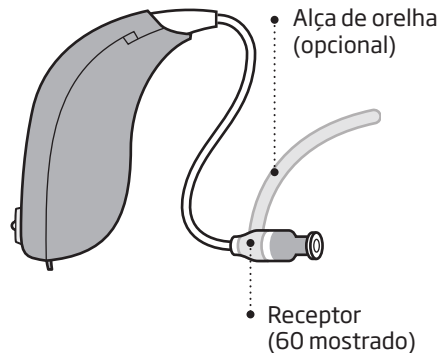


Passo 1



Coloque o aparelho auditivo atrás da sua orelha.

Passo 2

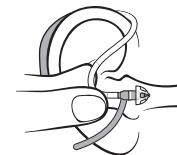

Segure a dobra do fio do receptor entre o seu polegar e o dedo indicador. O adaptador deve apontar em direção à abertura do conduto auditivo.


Passo 3



Empurre delicadamente o adaptador no seu conduto auditivo até que o fio do receptor fique perto da lateral da sua cabeça.

Adaptadores padrão: Domo ou Grip Tip

Tanto os domos quanto o Grip Tip são feitos de material de borracha flexível. Há 4 tipos de domos diferentes. Verifique o seu tipo e tamanho do domo abaixo.

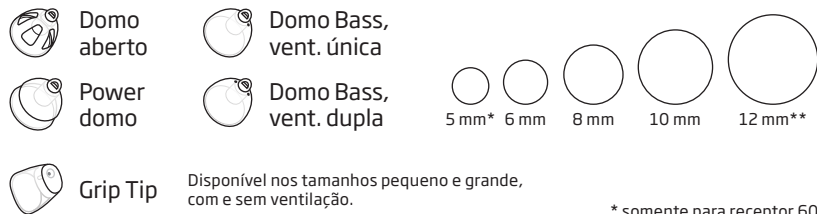


AVISO IMPORTANTE

Se o adaptador não estiver no receptor quando for removido do ouvido, o adaptador ainda pode estar no canal auditivo. Consulte o seu fonoaudiólogo para obter instruções adicionais.

Substitua o domo ou Grip Tip


O adaptador (domo ou Grip Tip) não deve ser limpo. Se o adaptador estiver cheio de cera, substitua-o por um novo. O Grip Tip deve ser substituído, no mínimo, uma vez por mês.

Passo 1

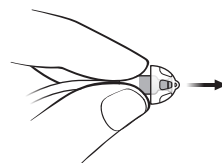


Segure o receptor e depois empurre o adaptador para fora.

Passo 2

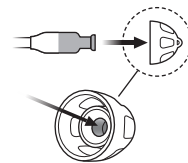

Insira o receptor exatamente no meio do adaptador para obter um encaixe firme.

Passo 3

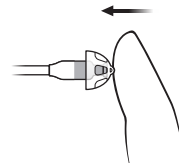

Empurre firmemente para garantir que o adaptador esteja preso de forma segura.

Filtro ProWax miniFit

O receptor tem um filtro de cerúmem acoplado no final. O filtro de cera evita que detritos e cerúmem danifiquem o receptor. Caso o filtro fique entupido, por favor troque ou entre em contato com seu Fonoaudiólogo.


Remova o adaptador do receptor antes de trocar o filtro de cerúmem.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Sempre use o mesmo tipo de filtro de cerúmem como o recebido junto do aparelho auditivo. Caso você tenha dúvida sobre qual filtro usar no seu AASI entre em contato com seu Fonoaudiólogo.

Trocando o filtro ProWax miniFit

1. Ferramenta

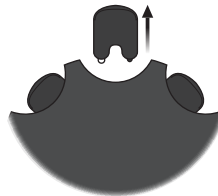


Remova a ferramenta do suporte. Ela tem dois pinos, um vazio para a remoção e o outro com o novo filtro acoplado.

2. Remova



Empurre o pino vazio dentro do filtro de cera do receptor e puxe para fora.

3. Insira

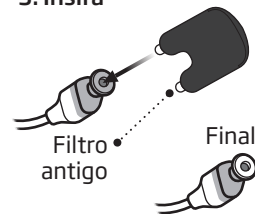


Insira o novo filtro usando o outro pino, remova a ferramenta e descarte.

Nota:

Caso você use um molde é necessário que você troque o filtro de cerúmem do receptor.

Adaptadores personalizados: Micro Molde, LiteTip ou Molde Flex Power

Há três tipos diferentes de moldes: Micro molde, LiteTip e Power molde. O Micro molde e o LiteTip estão disponíveis em dois materiais diferentes. Os adaptadores são personalizados para o seu ouvido.

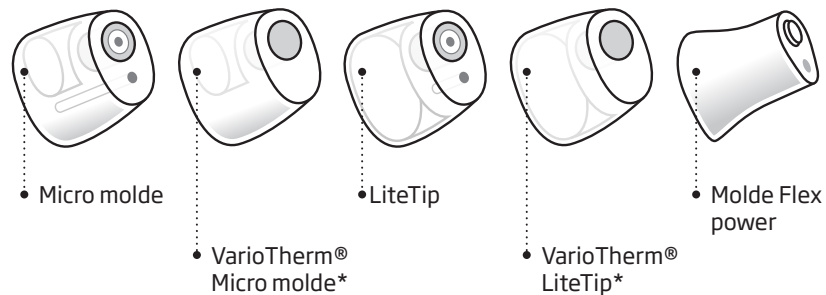

® VarioTherm Micro molde e LiteTip não têm filtro de cera


* Consulte os detalhes para a substituição do domo ou Grip Tip na seção: Substitua o domo ou GripTip

Limpeza do Micro Molde, LiteTip ou Molde Flex Power

O molde deve ser limpo regularmente.


O molde tem um filtro de cera que deve ser substituído quando estiver entupido ou se o aparelho auditivo não soar normal.

Sempre use o filtro de cera fornecido pelo seu Fonoaudiólogo.

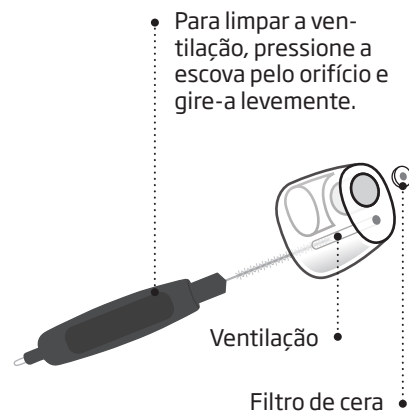

Substituição do filtro ProWax

1. Ferramenta

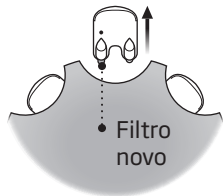


Remova a ferramenta da estrutura. A ferramenta tem dois pinos: um vazio para remoção e um pino com o filtro de cera novo.

2. Remover



Empurre o pino vazio para dentro do filtro de cera no molde e puxe para fora.

3. Colocar

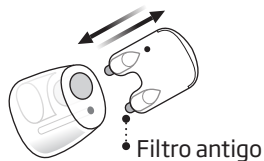

Insira o filtro de cera novo usando o outro pino, retire a ferramenta e jogue fora.

AVISO IMPORTANTE

Sempre use o mesmo tipo de filtro de cera que foi fornecido originalmente com o aparelho auditivo. Se você estiver em dúvida sobre o uso ou a substituição de filtros de cera, entre em contato com seu Fonoaudiólogo.

Recursos e acessórios opcionais


Os recursos e acessórios descritos nas seguintes páginas são opcionais. Entre em contato com o seu fonoaudiólogo para descobrir como o seu aparelho auditivo está programado.

Se você experimentar situações auditivas difíceis, um programa especial pode ser útil. Eles são programados pelo seu fonoaudiólogo.

Anote as situações auditivas em que você pode precisar de ajuda.

Colocando o aparelho auditivo no mudo

Use a função de mudo se precisar silenciar o aparelho enquanto estiver usando-o.

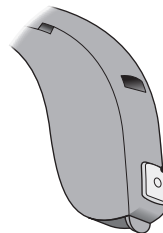


- Pressione longamente no botão para colocar o aparelho no mudo. Para reativar o aparelho, aperte o botão brevemente.

AVISO IMPORTANTE

Não use a função de mudo como forma de desligá-lo, pois o aparelho auditivo ainda possui corrente de bateria neste modo.

□ Mudando os programas



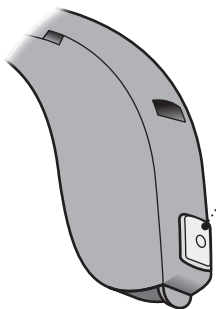

Seu aparelho auditivo pode ter até 4 programas diferentes. Eles são programados pelo seu fonoaudiólogo.



● Pressione o botão para mudar o programa

Observe que se você tiver dois aparelhos, o aparelho DIREITO muda o programa para frente, por exemplo, do programa 1 para o 2, e o aparelho ESQUERDO muda para trás, por exemplo, do programa 4 para o 3.

Para ser preenchido pelo fonoaudiólogo

Programa	Som que você ouvirá quando for ativado	Quando usar
1	 "1 bipe"	
2	 "2 bipes"	
3	 "3 bipes"	
4	 "4 bipes"	

Mudança de programa:	<input type="checkbox"/> ESQUERDO	<input type="checkbox"/> DIREITO	<input type="checkbox"/> Pressão curta	<input type="checkbox"/> Pressão longa
----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--	--

☐ Mudando o volume


Quando você tiver dois aparelhos, o botão de pressionar permite que você ajuste o volume em ambos os ouvidos. Você ouvirá um clique quando aumentar ou diminuir o volume.




Reinicialização rápida

Se você quiser retornar às configurações padrão do aparelho programado pelo seu fonoaudiólogo, simplesmente abra e depois feche a gaveta de bateria.

Abrir

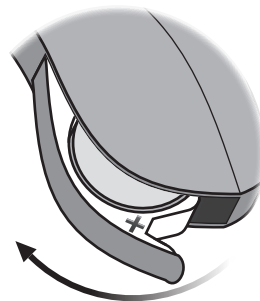

Fechar

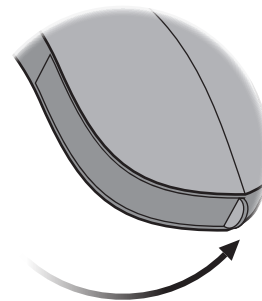

□ Gaveta resistente de bateria


Para manter a bateria longe do alcance de bebês, crianças pequenas e pessoas com dificuldade, uma gaveta resistente de bateria deve ser usada. Use uma pequena chave de fenda para abrir a gaveta.

AVISO IMPORTANTE

Evite usar força excessiva para abrir a gaveta da bateria. Não force a gaveta de bateria além da sua posição completamente aberta. Certifique-se de inserir a bateria corretamente.

Entre em contato com o seu fonoaudiólogo se suspeitar que a capacidade de travamento e efetividade da resistência estiver danificada.

Abra e feche a gaveta da bateria.

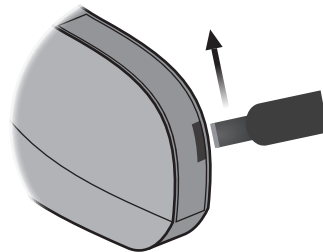

Insira a chave de fenda no encaixe na parte de trás do aparelho auditivo. Feche a gaveta usando seus dedos. Certifique-se de que a gaveta esteja completamente fechada.

Dispositivos Auxiliares sem fio

Como uma melhoria para seu aparelho auditivo sem fio, uma ampla gama de dispositivos auxiliares sem fio está disponível.

ConnectLine

ConnectLine é uma família de produtos que permite que você receba sinais de áudio de TVs, telefones, aparelhos de música, computadores e um microfone externo sem fio através do seu aparelho auditivo.

Controle Remoto

O Controle Remoto oferece uma oportunidade de mudar o programa ou ajustar o volume no seu aparelho auditivo.

Para mais informações, entre em contato com seu fonoaudiólogo ou visite o site www.oticon.global

Outras opções



Autofone

é um programa que será automaticamente ativado quando o seu telefone tiver um teleloop embutido. Um ímã precisa ser colocado no seu telefone perto da saída de som. O autofone ativa um programa de telefone especial nos seus aparelhos auditivos.

Para obter mais informações, entre em contato com o seu Fonoaudiólogo.

Avisos

Você deve se familiarizar completamente com os seguintes avisos gerais antes de usar o seu aparelho auditivo, para que tenha segurança pessoal e para garantir o uso correto.

Observe que um aparelho auditivo não restaurará a audição normal e não impedirá nem melhorará uma perda auditiva resultante de condições orgânicas. Além disso, observe que na maioria dos casos, o uso pouco frequente de um aparelho auditivo não permite que o usuário obtenha benefício completo dele.

Consulte o seu fonoaudiólogo se você observar operações ou eventos inesperados com o seu aparelho auditivo.

Uso dos aparelhos auditivos

Os aparelhos auditivos devem ser usados apenas conforme orientado e ajustados pelo seu fonoaudiólogo. O uso indevido pode resultar em perda auditiva repentina e permanente.

Nunca permita que outras pessoas usem o seu aparelho auditivo, pois o uso incorreto pode causar danos permanentes à audição.

Perigos de engasgo e risco de engolir as baterias

Os aparelhos auditivos, suas peças e baterias devem ser mantidos longe do alcance de crianças e de qualquer pessoa que possa engolir esses itens ou ferir-se com eles.

Baterias ocasionalmente podem ser confundidas com pílulas. Portanto, verifique o seu remédio cuidadosamente antes de engolir qualquer pílula.

Mediante solicitação, a maioria dos aparelhos auditivos pode ser fornecida com uma gaveta da bateria inviolável. Isso é fortemente recomendado para crianças, bebês e pessoas com dificuldades de aprendizado.

Crianças menores que 36 meses deve sempre usar uma gaveta de bateria com trava. Por favor entre em contato com seu Fonoaudiólogo sobre a disponibilidade dessa opção.

Se uma bateria ou aparelho auditivo for engolido, consulte um médico imediatamente.

Avisos

Uso da bateria

Sempre use as baterias recomendadas pelo seu fonoaudiólogo. Baterias de baixa qualidade podem vaziar e causar danos ao corpo.

Nunca tente recarregar suas baterias e nunca as descarte queimando-as. Há risco de que as baterias explodam.

Mau funcionamento

Esteja ciente da possibilidade de que seu aparelho auditivo pode parar de funcionar sem aviso prévio. Tenha isso em mente quando você depender de sons de avisos (por exemplo, quando você estiver em tráfego). Os aparelhos auditivos podem parar de funcionar, por exemplo, se as baterias estiverem gastas ou se o tubo estiver bloqueado com umidade ou cera de ouvido.

Implantes ativos

Deve-se tomar cuidado com implantes ativos. Em geral, siga as diretrizes conforme recomendado pelos fabricantes de desfibriladores implantáveis e marca-passos em relação ao uso com celulares e ímãs.

O ímã Autofone e a ferramenta (que tem um ímã integrado) devem ser mantidos a mais de 30 cm de distância do implante; por exemplo, não os carregue em uma bolsa a tiracolo.

Se você tiver um implante cerebral ativo, entre em contato com o fabricante do seu dispositivo implantável para informações sobre o risco de problemas.

Raios-X/tomografia computadorizada/ressonância magnética/escaneamento PET e eletroterapia

Remova o seu aparelho auditivo antes de exames de raios-X, tomografia computadorizada / ressonância magnética / escaneamento PET eletroterapia, cirurgia, etc., pois o seu aparelho auditivo pode ser danificado quando exposto a campos fortes.

O calor e os produtos químicos

O aparelho auditivo nunca deve ser exposto ao calor extremo, por exemplo, dentro de um carro estacionado no sol.

O aparelho auditivo não deve ser seco em micro-ondas ou outros fornos.

Os produtos químicos em cosméticos, spray de cabelo, perfume, loção pós-barba, bronzeador e repelente de inseto podem danificar o seu aparelho auditivo. Sempre remova o seu aparelho auditivo antes de aplicar esses produtos e dê tempo para o produto secar antes de usá-lo.

Avisos

Aparelho Power

Deve ser tomado cuidado especial ao selecionar, encaixar e usar um aparelho auditivo onde a capacidade de pressão sonora máxima exceda 132 dB SPL (IEC 711), pois pode haver risco de prejuízo à audição remanescente do usuário do aparelho auditivo.

Para informações sobre se o seu aparelho é um aparelho power, veja a parte de trás deste panfleto.

Possíveis efeitos colaterais

Aparelhos auditivos, moldes ou domos podem causar um acúmulo acelerado de cera de ouvido.

Os materiais não alergênicos usados nos aparelhos auditivos podem, em casos raros, causar irritação da pele ou outros efeitos colaterais.

Consulte um médico se essas condições ocorrerem.

Interferência

O aparelho auditivo foi testado exaustivamente quanto às interferências, de acordo com os mais rígidos padrões internacionais. Porém, pode ocorrer interferência entre o aparelho auditivo e outros dispositivos (por exemplo, alguns celulares, dispositivos de rádio PX, sistemas de alarme de lojas e outros dispositivos sem fios). Se isso ocorrer, aumente a distância entre o aparelho auditivo e o aparelho causador da interferência.

Conexão com equipamento externo

A segurança do aparelho auditivo quando conectado a equipamento externo (via cabo de entrada auxiliar, cabo USB ou diretamente). Quando conectado ao equipamento externo ligado a uma tomada de energia, esse equipamento deve estar em conformidade com os a IEC-60065, IEC-60950 ou padrões de segurança equivalentes.

Guia de solução de problemas

Sintoma	Possíveis causas	Soluções
Sem som	Bateria gasta	Substitua a bateria
	Receptores ou adaptadores entupidos (domo, GripTip, Micro molde ou LiteTip)	Limpe o molde
		Considere substituir o filtro de cera ou domo
Som intermitente ou reduzido	Saída de som entupida	Limpe o molde ou substitua o filtro de cera ou domo
	Umidade	Enxugue a bateria com um pano seco
	Bateria gasta	Substitua a bateria
Chiado	Adaptador do aparelho auditivo inserido incorretamente	Reinsira o aparelho auditivo
	Cera de ouvido acumulada no conduto auditivo	Examine o seu conduto auditivo com o seu médico

Se nenhuma das soluções acima funcionar, consulte o seu fonoaudiólogo.

Resistência à água

Seu aparelho auditivo é resistente à água, não é à prova d'água. Caso o seu aparelho auditivo entre em contato com água e pare de funcionar, siga essas diretrizes:

1. Enxugue toda a água
2. Abra a gaveta de bateria e remova a bateria e delicadamente enxugue toda a água da gaveta de bateria
3. Deixe o aparelho auditivo secar com a gaveta de bateria aberta por aprox. 30 minutos.
4. Insira uma nova bateria

AVISO IMPORTANTE

Não use seu aparelho auditivo enquanto estiver no banho ou participando de atividades aquáticas. Não afunde o seu aparelho auditivo na água nem em outros líquidos.

Condições de uso

Condições operacionais	Temperatura: +1°C a +40°C Umidade relativa: 5% a 93%, não condensante
Condições de armazenamento e transporte	A temperatura e a umidade não devem exceder aos limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento: Temperatura: -25°C a +60°C Umidade relativa: 5% a 93%, não condensante

Certificado de garantia

Nome do proprietário: _____

Fonoaudiólogo: _____

Endereço do fonoaudiólogo: _____

Telefone do fonoaudiólogo: _____

Data da compra: _____

Período de garantia: _____ Mês: _____

Modelo esquerdo: _____ Número de série: _____

Modelo direito: _____ Número de série: _____

Garantia internacional

Seu aparelho auditivo é coberto por uma garantia internacional limitada emitida pelo fabricante por um período de 12 meses desde a data de entrega. Esta garantia limitada cobre defeitos de fabricação e de materiais no próprio aparelho auditivo, mas não acessórios como baterias, tubos, filtros de cera de ouvido, etc. Problemas provenientes do manuseio ou cuidado inadequado, uso excessivo, acidentes, reparos feitos por pessoas não autorizadas, exposição a condições corrosivas, mudanças físicas no seu ouvido, dano devido a objetos estranhos entrando no dispositivo, ou ajustes incorretos NÃO são cobertos pela garantia limitada e podem anulá-la. A garantia acima não afeta nenhum direito legal que você possa ter sob a legislação nacional aplicável governando a venda de bens de consumo. Seu

fonoaudiólogo pode ter emitido uma garantia que vá além das cláusulas desta garantia limitada. Consulte-o para mais informações.

Se precisar de assistência

Leve o seu aparelho auditivo para seu fonoaudiólogo, que pode resolver pequenos problemas e ajustes no local imediatamente.

Informações técnicas

O aparelho auditivo contém um transmissor de rádio usando tecnologia de indução magnética de curto alcance funcionando a 3,84 MHz. A força do campo magnético do transmissor é < -42 dB μ A/m a 10 m.

A energia de emissão do sistema de rádio está bem abaixo dos limites de emissão internacionais para exposição humana. Para comparação, a radiação do aparelho auditivo é inferior à radiação eletromagnética não pretendida de, por exemplo, lâmpadas alógenas, monitores de computador, lavadoras de louça, etc. O aparelho auditivo está em conformidade com os padrões internacionais em relação à compatibilidade eletromagnética.

Devido ao espaço limitado disponível nos aparelhos, todas as marcações de aprovação são encontradas neste documento.

EUA e Canadá

O aparelho auditivo contém um módulo com:

FCC ID: U28FU2MRIT

IC: 1350B-FU2MRIT

O dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras FCC e RSS-210 da Indústria do Canadá.

A operação está sujeita às duas seguintes condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.

Mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável para conformidade podem invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo digital de Classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites de dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a seção 15 das normas FCC. Esses limites são projetados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial em ambiente residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações via rádio. Não há garantia de que a interferência não vá ocorrer em uma instalação particular. Se este equipamento causar

interferência à recepção de rádio e televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada que esteja num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o fabricante ou um técnico experiente em rádio/tv para obter ajuda.

O fabricante declara que este aparelho auditivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

A Declaração de Conformidade é disponibilizada pelo fabricante.



Fabricado por:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.global

CE 0543



O descarte de equipamentos eletrônicos deve ser manuseado de acordo com os regulamentos locais.



IP58

Descrição de símbolos utilizados neste livreto



Advertências

O texto marcado com um símbolo de marcação deve ser lido antes de usar o produto.



Fabricante

O produto é manufaturado pelo fabricante cujo nome e endereço estão indicados ao lado do símbolo. Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido pelas Diretivas da UE 90/385/EEC, 93/42/EEC E 98/79/EC.



Marcação CE

O produto está em conformidade com a Diretiva para Dispositivos Médicos 93/42/EEC. O número de quatro dígitos indica a identificação do órgão notificado.



Resíduos de equipamentos eletrônicos (WEEE)

Recicle seus aparelhos auditivos, acessórios ou baterias de acordo com as regulamentações locais ou devolva-os ao seu profissional de cuidados auditivos para descarte correto. Equipamentos eletrônicos cobertos pela Diretiva 2012/19/EU sobre resíduos e equipamentos elétricos (WEEE).



Marca de conformidade regulatória (RCM)

O produto está em conformidade com a segurança elétrica, EMC e requisitos de espectro de rádio para produtos fornecidos ao mercado da Austrália e da Nova Zelândia.

IP58

Código IP

Este símbolo indica a classe de proteções contra entrada prejudicial de água e material particular, conforme EN 60529:1991/A1:2002. IP5X indica proteção contra poeira. IPX8 indica proteção contra os efeitos da imersão contínua em água.

Descrição de símbolos utilizados na etiqueta da embalagem regulatória



Manter seco

Indica um dispositivo médico que precisa ser protegido contra a umidade.



Símbolo de advertência

Consulte os alertas e advertências nas instruções de uso.



Número do catálogo

Indica o número de catálogo do fabricante, de modo que o dispositivo médico possa ser identificado.



Número de série

Indica o número de série do fabricante, de modo que um dispositivo médico específico possa ser identificado.

Aparelho Power <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
Visão geral das configurações para seu aparelho auditivo				
Esquerdo		Direito		
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Controle de volume	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Mudança de programa	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Mudo	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Indicadores de controle de volume				
<input type="checkbox"/> Ligado	<input type="checkbox"/> Desligado	Bipe no volume mín./máx.	<input type="checkbox"/> Ligado	<input type="checkbox"/> Desligado
<input type="checkbox"/> Ligado	<input type="checkbox"/> Desligado	Clica ao mudar o volume	<input type="checkbox"/> Ligado	<input type="checkbox"/> Desligado
<input type="checkbox"/> Ligado	<input type="checkbox"/> Desligado	Bipe no volume preferido	<input type="checkbox"/> Ligado	<input type="checkbox"/> Desligado
Indicadores de bateria				
<input type="checkbox"/> Ligado	<input type="checkbox"/> Desligado	Aviso de bateria fraca	<input type="checkbox"/> Ligado	<input type="checkbox"/> Desligado

Informações Gerais

Nome Técnico do Produto:
Aparelho Auditivo

Nome Comercial do Produto:
Aparelho Auditivo Retroauricular 2

Modelos:
miniRITE

Importado e Distribuído por:
Centro Auditivo Telex LTDA
Avenida Venezuela, 27 sala 901 Saúde
Rio de Janeiro / RJ - Brasil
Cep: 20.081-311

Central de Atendimento: 0800 0249
3439
C.N.P.J./MF 33.060.302/0001-04

Fabricado Por:
Oticon A/S
9, Kongebakken
Dk - Smørum - Dinamarca
Tel.: +45 39 27 79 00
Fax: +45 97 92 41 22

Responsável Técnica: **Isabela Papera
de Carvalho**
CRFa: 11946/RJ

REG. ANVISA: 103.560.200-99

151785BR / 2018.09.25

Nomenclatura dos Aparelhos
Auditivos Oticon
BTE = Behind The Ear = Atrás da Orelha
= Retroauricular = Compact

151785BR / 2018.09.25



oticon
PEOPLE FIRST

151785BR / 2018.09.25