


Instruções de uso

Adaptador
de Telefone 2.0

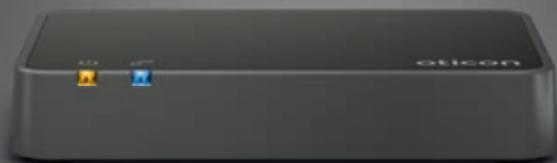

oticon
life-changing technology

Introdução para este livreto

Este livreto orienta você sobre como usar e manter o seu novo adaptador de telefone. Leia o livreto cuidadosamente, incluindo a seção **Avisos**. Isso o ajudará a tirar o máximo de proveito do seu adaptador de telefone.

Se você tiver perguntas adicionais sobre o uso do seu adaptador de telefone, entre em contato com o seu fonoaudiólogo.

Para a sua conveniência, este livreto contém a barra de navegação baixo para ajudá-lo a navegar facilmente pelas diferentes seções.

| **Sobre** | [Instalação](#) | [Manuseio](#) | [Avisos](#) | [Mais informações](#) |

Uso pretendido

Uso pretendido	O adaptador de telefone 2.0 deve ser usado em conjunto com os aparelhos auditivos sem fio Oticon ConnectClip, Oticon Streamer Pro e Oticon. Isso permite que o usuário do aparelho auditivo se comunique sem fio com um interlocutor em conversa telefônica por meio de um telefone fixo (analógico/PSTN).
Indicações para uso	Sem indicações de uso.
Usuários ao qual o produto se destina	Adultos e crianças com mais de 36 meses.
Ambiente do usuário	Interno.
Contraindicações	Não há contraindicações.
Benefícios clínicos	Veja os benefícios clínicos do aparelho auditivo.

Índice

Sobre

Conteúdo da embalagem	6
Visão geral do adaptador de telefone	7

Instalação

Instalação	9
Conectando o adaptador de telefone a uma tomada elétrica	10
Conectar-se com linha telefônica e telefone fixo	12
Emparelhando o Streamer Pro com o adaptador de telefone	14
Emparelhando o ConnectClip com o adaptador de telefone	16
Usando o adaptador de telefone	18

Manuseio

Chamadas recebidas Streamer Pro	20
Chamadas efetuadas Streamer Pro	23
Chamadas recebidas ConnectClip	26
Chamadas efetuadas ConnectClip	29
Informações Técnicas	32

Avisos

Avisos Gerais	35
---------------	----

Mais informações

Condições de uso	36
Garantia internacional	37
Informação Técnica	38

Conteúdo da embalagem

A embalagem consiste dos seguintes elementos:



Adaptador de Telefone 2.0



Fonte de alimentação
(A fonte de alimentação pode variar de país para país)



Cabo do telefone




Este livreto

Visão geral do adaptador de telefone

Frente

Indicador de energia


Indicador do telefone

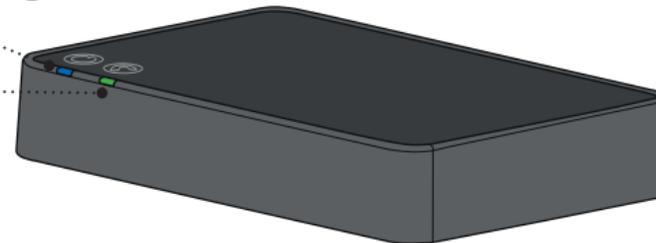

Condições	Indicador de energia	Indicador do telefone
Ligado, nenhuma conexão ao Streamer Pro ou ao ConnectClip		
Pareando com o Streamer ou ConnectClip		
O Streamer ou ConnectClip está conectado sem fios		
Chamada recebida		
Conversa telefônica		
Condição de falha (entre em contato com o seu fonoaudiólogo)		

Sem luz Piscando Estável

Verso

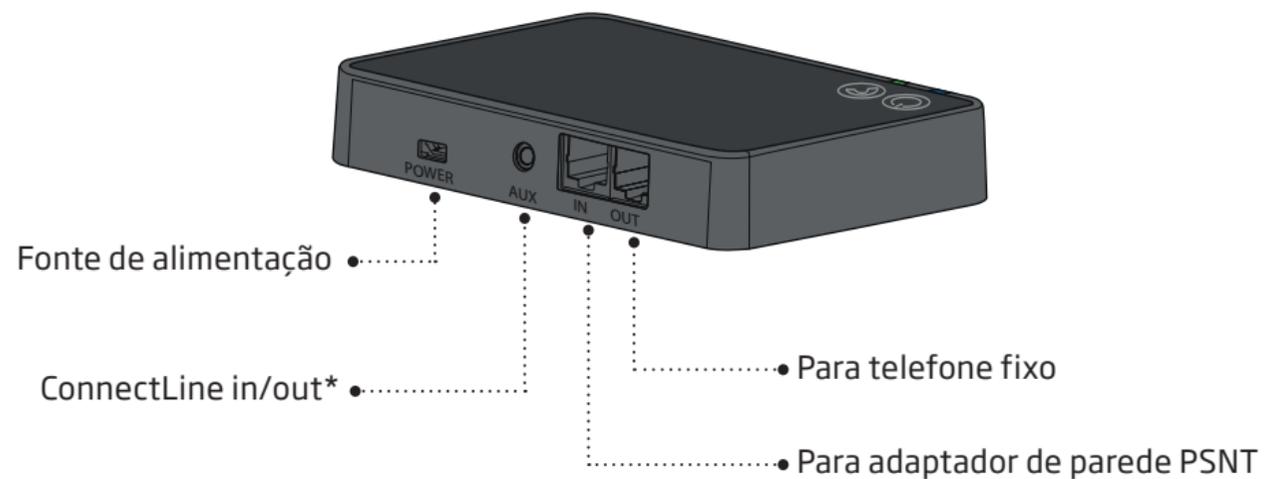

Instalação

Usando o adaptador de telefone pela primeira vez

Antes de poder usar o adaptador de telefone com seus aparelhos auditivos, o adaptador de telefone deve estar conectado a uma tomada elétrica e à linha telefônica pública.

Este é um guia passo a passo sobre como instalar o adaptador de telefone.

Todas as partes necessárias para a instalação estão incluídas no pacote.

Para mais informações, visite: www.oticon.global/connectline


Conectando o adaptador de telefone a uma tomada elétrica

Use a fonte de alimentação com cabo USB da caixa 1

1. Conecte o conector USB ao conector "power" no adaptador de telefone.
2. Conecte a fonte de alimentação à tomada da rede elétrica ou a outra fonte de energia.
3. Verifique se a energia está ligada.
4. Após alguns segundos, o indicador de energia  na frente do adaptador de telefone acenderá em verde.

AVISO IMPORTANTE

Ao carregar o adaptador de telefone, use o cabo fornecido original de alimentação 5.0V/1A, CE e com etiqueta de segurança.

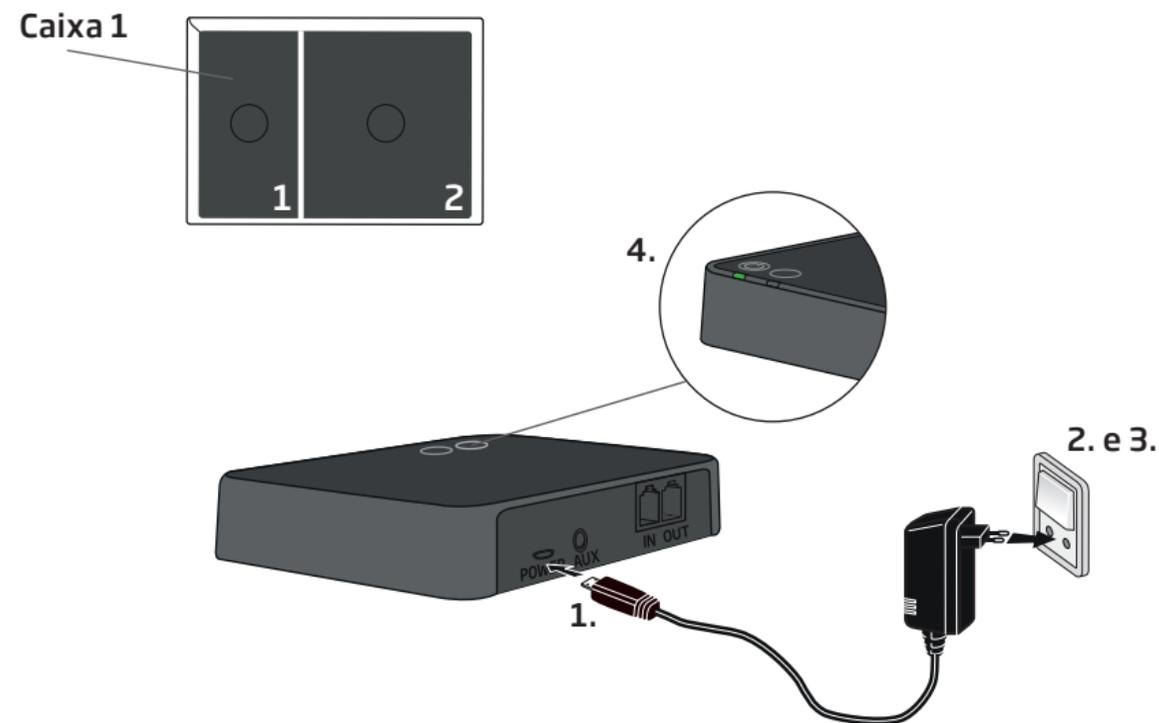


Conectar-se com linha telefônica e telefone fixo

Coloque o adaptador de telefone em um local adequado próximo ao telefone fixo ou estação base.

1. Desconecte a linha telefônica do telefone fixo (ou da estação base).*
2. Conecte a linha telefônica do adaptador de parede ao conector "IN" do adaptador de telefone.
3. Conecte o cabo do telefone da caixa 2 no conector "OUT" do adaptador de telefone.
4. Conecte a outra extremidade do cabo telefônico ao telefone fixo (ou estação base).*

Retire o fone do seu telefone fixo - agora você deve ouvir o tom de discagem a partir do fone.

* Se o seu telefone principal ou estação base não tiver um plugue destacável para a conexão de telefone fixo, tente usar um telefone alternativo ou entre em contato com um técnico para concluir a instalação.

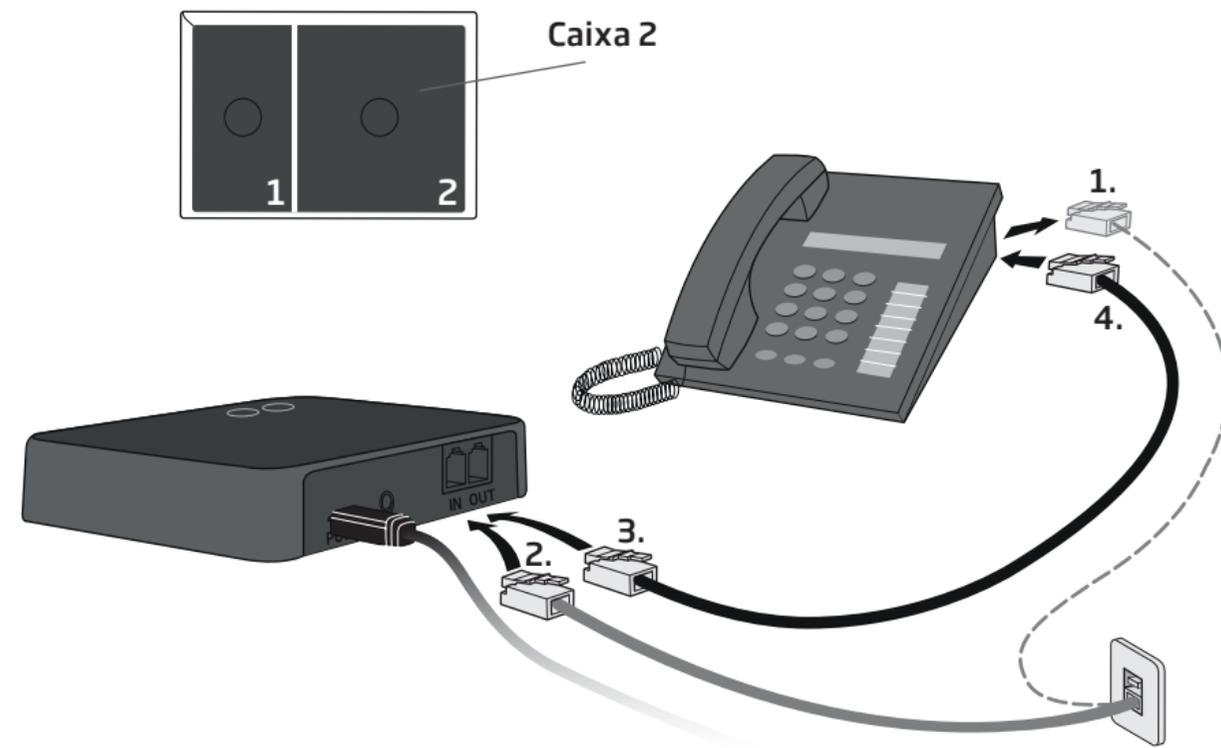

Pareando o Streamer Pro com o adaptador de telefone

Na primeira vez em que o Streamer é usado com o adaptador de telefone, ele deve ser pareado ao adaptador de telefone.

Para o pareamento:

1. Certifique-se de que o Adaptador de TV esteja ligado, ou seja, o indicador de energia esteja verde estável.
2. Pressione e segure o botão LIGAR/DESLIGAR no Streamer por 5 a 6 segundos até que a luz azul comece a piscar.
3. Coloque o Streamer Pro no topo ou perto do adaptador de telefone - o pareamento leva em torno de 20 a 60 segundos.
4. O pareamento é concluído quando o indicador de energia no adaptador de telefone e o indicador no Streamer fica azul estável. O pareamento é feito apenas uma vez e normalmente não terá que ser repetido.



Pareamento com o Streamer Pro			
Streamer Pro status superior	Streamer Pro frente	Telefone Adaptador	Descrição do Status
  	-	 	Streamer e adaptador de telefone ligados
  	-	 	Streamer em modo de pareamento
  	-	 	Pareamento completo


 Estável  Piscando

Pareamento do ConnectClip com o adaptador de telefone

Na primeira vez em que o ConnectClip é usado com o adaptador de telefone, ele deve ser pareado e emparelhado ao adaptador de telefone.

Para o pareamento :

1. Certifique-se de que o Adaptador de TV esteja ligado, ou seja, o indicador de energia esteja verde estável.
2. Pressione e segure simultaneamente o multibotão E o botão de aumentar volume no ConnectClip (B) por cerca de 6 segundos até que o indicador de status fique azul piscando.
3. Coloque o ConnectClip em cima do adaptador de telefone - o pareamento leva em torno de 20 a 60 segundos.
4. O pareamento é concluído quando o indicador de energia no adaptador de telefone e o indicador no ConnectClip fica azul estável. O pareamento é feito apenas uma vez e normalmente não terá que ser repetido.

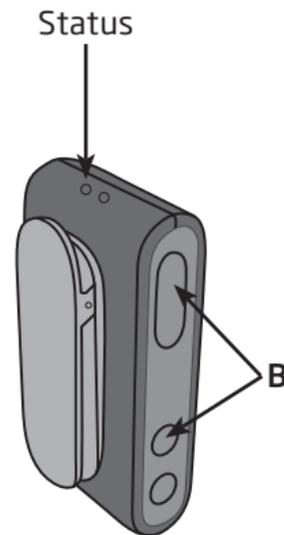

Pareamento com o ConnectClip			
Status do ConnectClip	Energia do ConnectClip	Telefone Adaptador	Descrição do Status
	●	● ○	ConnectClip e adaptador de telefone ligados
●	●	● ○	ConnectClip no modo de pareamento
●	●	● ○	Pareamento completo

● Estável ● Piscando ● Energia

Usando o adaptador de telefone

O adaptador de telefone suporta chamadas recebidas e efetuadas. Durante uma ligação, os aparelhos auditivos são usados como fones de ouvido e o microfone, no Streamer ou no ConnectClip, permite a operação com as mãos livres.


Verifique se o adaptador telefônico está instalado corretamente, conforme descrito na seção a seguir, antes de usar o Streamer ou o ConnectClip para conversas telefônicas pela primeira vez.

Para usar o adaptador de telefone, o Streamer ou o ConnectClip e o adaptador de telefone devem estar conectados sem fio. Essa conexão é estabelecida automaticamente quando o Streamer e o adaptador de telefone estão pareados e dentro do alcance. O adaptador de telefone está conectado ao Streamer ou ConnectClip quando o indicador de energia ● no adaptador de telefone está azul estável.




Streamer Pro
Ver Página

22

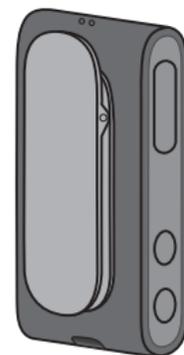

ConnectClip
Ver Página

30

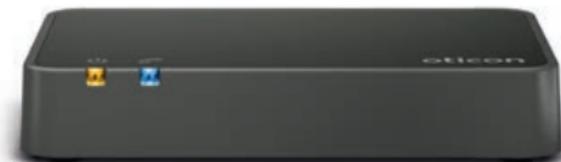

Chamadas recebidas Streamer Pro


Como responder e encerrar uma chamada

Verifique se você pode falar no microfone do Streamer.

Quando o telefone fixo tocar, você ouvirá uma notificação de chamada recebida em seus aparelhos auditivos. O indicador do telefone no adaptador do telefone pisca em verde e, ao mesmo tempo, o botão do telefone no Streamer e o indicador pisca em verde.

Pressione brevemente o botão do telefone no Streamer para atender a chamada. Você ouvirá um bipe de confirmação nos seus aparelhos auditivos. O botão do telefone e o indicador de status no Streamer e o indicador de telefone no adaptador de telefone estão acesos em verde estável.

Para encerrar a chamada, pressione brevemente o botão do telefone no Streamer e o botão verde do telefone no Streamer se apaga.

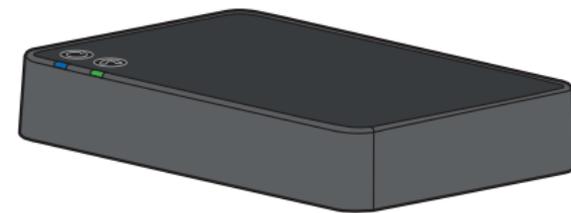

Recebendo uma chamada Streamer Pro			
Streamer Pro status superior	Streamer Pro frente	Telefone Adaptador	Descrição do Status
			Streamer e adaptador de telefone conectados
			Telefone tocando: O indicador do telefone e o status superior do Streamer piscam em verde. Você ouvirá uma notificação de chamada recebida nos seus aparelhos auditivos.
			Quando a chamada estiver conectada, você ouvirá um sinal sonoro reconhecendo que a chamada foi atendida - agora você pode ouvir e conversar com a outra pessoa.

 Estável  Piscando

Chamadas efetuadas Streamer Pro

Como fazer uma chamada


Verifique se você pode falar no microfone do Streamer.

1. Para fazer uma ligação, pressione brevemente o botão do telefone do Streamer. Com o gancho fora da base, você ouvirá um tom de discagem nos aparelhos auditivos. O botão do telefone no Streamer e o indicador de telefone no adaptador de telefone ficarão verde estável.
2. Pegue o fone do seu telefone fixo (ou pressione "Ligar" no telefone portátil) e disque o número de telefone normalmente para fazer uma ligação.
3. Após alguns instantes, você ouvirá o tom de chamada nos seus aparelhos auditivos, indicando que a chamada agora está conectada através do Streamer e dos aparelhos auditivos.

Agora você pode colocar o telefone de volta (ou pressionar "finalizar chamada" no telefone portátil).

Para encerrar a ligação, pressione brevemente o botão do telefone no Streamer.

Nota: Coloque o fone corretamente de volta no telefone - caso contrário, a linha telefônica bloqueará as chamadas recebidas.

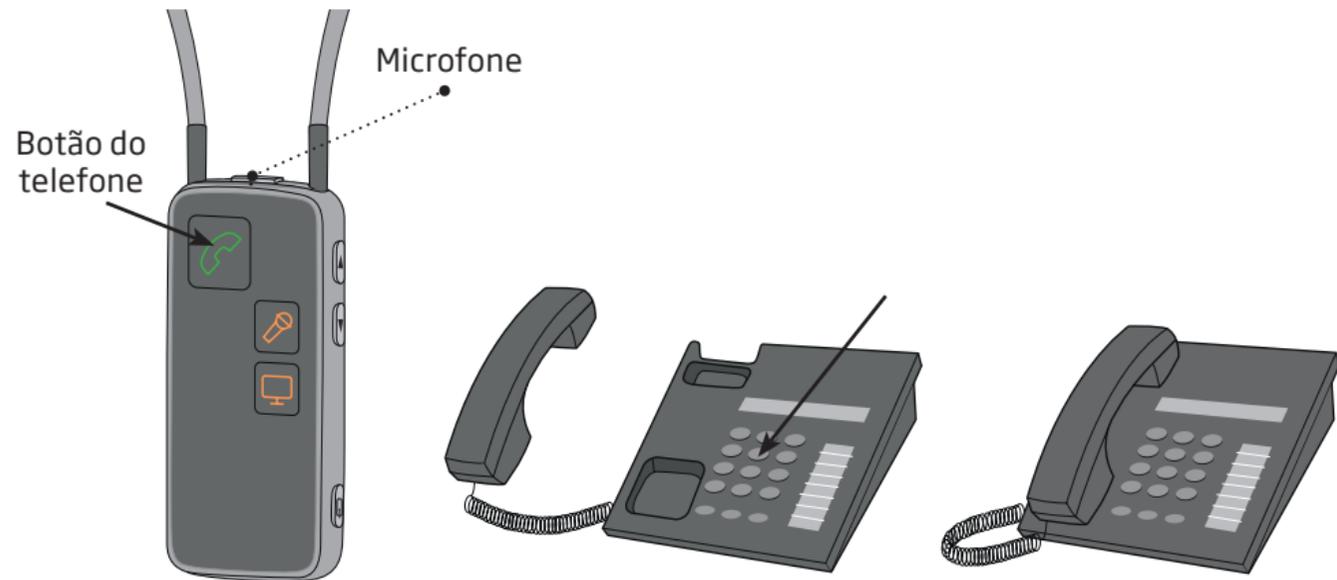

Fazer uma chamada			
Streamer Pro status superior	Streamer Pro frente	Telefone Adaptador	Descrição do Status
● (green) (P) (white)		● (blue) (phone icon)	O Streamer e o adaptador de telefone estão conectados
● (green) (P) ● (green)	● (green) (phone icon)	● (blue) ● (green) (phone icon)	Pressione brevemente o botão do telefone no Streamer e você ouvirá um tom de discagem nos aparelhos auditivos.

● Estável ● Piscando

Chamadas recebidas ConnectClip



Como fazer uma chamada

Verifique se você pode falar no microfone do ConnectClip (A).

Quando o telefone fixo tocar, você ouvirá uma notificação de chamada recebida em seus aparelhos auditivos. O indicador do telefone no adaptador do telefone piscará em verde e, ao mesmo tempo, o indicador de status no ConnectClip piscará em verde (B).

Pressione brevemente o multibotão no ConnectClip (C) para atender à chamada. Você ouvirá um breve bipe de confirmação nos seus aparelhos auditivos. O indicador de status no ConnectClip e o indicador de telefone no adaptador de telefone ficarão verde estável.

Para encerrar a chamada, basta pressionar brevemente o multibotão no ConnectClip e o indicador de status fica azul.

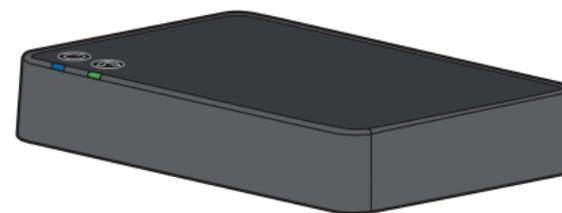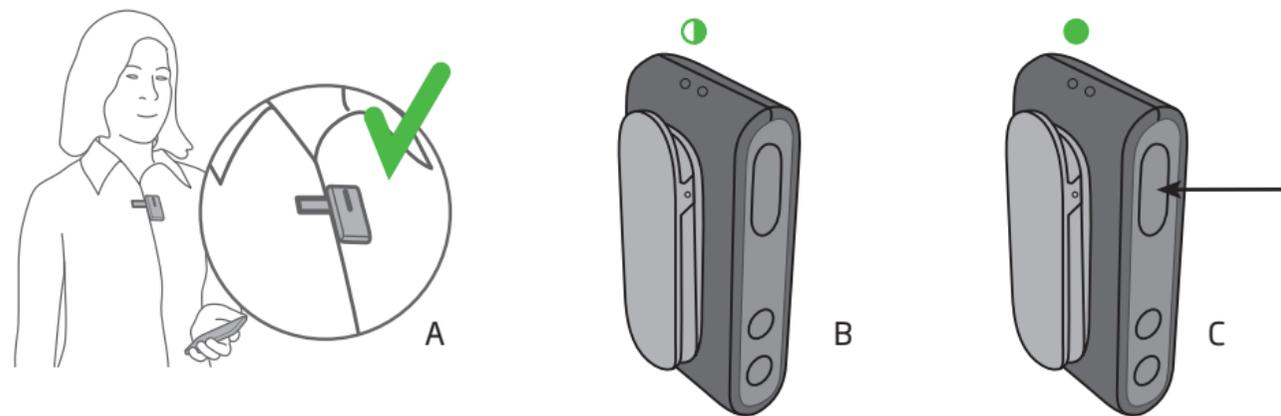

Nota: O ConnectClip só pode ser emparelhado com um dispositivo por vez. Veja a página 18 para instruções de emparelhamento.

Recebendo uma chamada ConnectClip			
Status do ConnectClip	Energia do ConnectClip	Telefone Adaptador	Descrição do Status
		 	O ConnectClip e o adaptador de telefone estão conectados.
		 	Telefone tocando: O indicador do telefone e o indicador de status do ConnectClip piscam em verde. Você ouvirá uma notificação de chamada recebida nos seus aparelhos auditivos.
		 	Quando a chamada estiver conectada, você ouvirá um sinal sonoro reconhecendo que a chamada foi atendida - agora você pode ouvir e conversar com a outra pessoa.

 Estável  Piscando

Chamadas efetuadas ConnectClip

Como fazer uma chamada


Verifique se você pode falar no microfone do ConnectClip (A).

1. Para fazer uma ligação, pressione brevemente o multibotão do ConnectClip (B). Com o gancho fora da base, você ouvirá um tom de discagem nos aparelhos auditivos. O indicador de status no ConnectClip e o indicador de telefone no adaptador de telefone ficarão verde estável.
2. Pegue o fone do seu telefone fixo (ou pressione "Ligar" no telefone portátil) e disque o número de telefone (C) normalmente para fazer uma ligação.
3. Após alguns instantes, você ouvirá o tom de chamada nos seus aparelhos auditivos, indicando que a chamada agora está conectada através do ConnectClip e dos aparelhos auditivos.


Agora você pode colocar o telefone de volta (ou pressionar "finalizar chamada" no telefone portátil).

Para encerrar a chamada, basta pressionar brevemente o multibotão no ConnectClip.


Nota: Coloque o fone corretamente de volta no telefone - caso contrário, a linha telefônica bloqueará as chamadas recebidas.

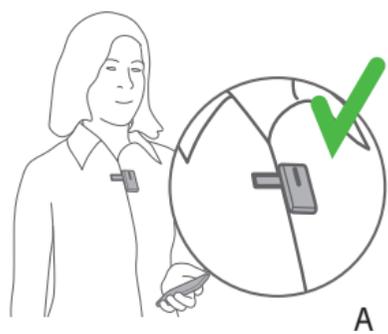

A

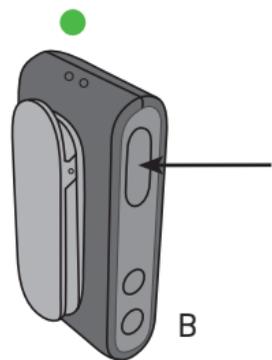

B

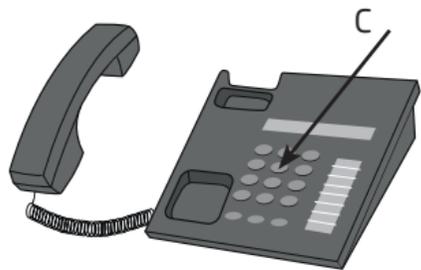

C



Fazer uma chamada

Status do ConnectClip	Energia do ConnectClip	Telefone Adaptador	Descrição do Status
			O ConnectClip e o adaptador de telefone estão conectados.
			Pressione brevemente o multibotão no ConnectClip e você ouvirá um tom de discagem nos aparelhos auditivos.

Estável Piscando

AVISO IMPORTANTE

Use um pano macio e seco para limpar o adaptador de telefone. O adaptador de telefone nunca deve ser lavado ou imerso em água ou outros líquidos.

Informações adicionais

Desligue o adaptador de telefone

Se você não deseja receber chamadas telefônicas no seu Streamer, desligue o adaptador telefônico desconectando a energia. Para uso normal, o adaptador de telefone usa muito pouca energia, portanto não é necessário desligá-lo.

Intervalo

O adaptador de telefone tem um alcance de até 30 metros para o Streamer e até 20 metros para o ConnectClip, dependendo de móveis e paredes. Dentro desse intervalo, você pode conversar por telefone com as mãos livres com boa qualidade de som (ou seja, sem som “quebrado”).

Normalmente, você poderá ouvir a notificação de chamada recebida nos aparelhos auditivos a uma distância de 30 a 40 metros, mas precisará se aproximar do adaptador do telefone para ouvir claramente a voz do interlocutor. Isso pode ser útil, por exemplo, ao trabalhar no jardim.

Controle de volume

Use os botões de volume no seu Streamer Pro ou no ConnectClip para ajustar o nível de volume nos aparelhos auditivos. Ajuste o volume pressionando para cima ou para baixo brevemente. Pressione brevemente mais uma vez para realizar outros ajustes.

O nível de volume do telefone definido pelo Streamer é memorizado. Isso significa que, da próxima vez que uma ligação for feita, será aplicado o nível de volume memorizado. Este recurso não está disponível no ConnectClip.

Ouvir apenas o som do telefone

Os microfones do aparelho auditivo estão ligados por padrão.

No entanto, os microfones do aparelho auditivo podem ser silenciados, permitindo que você ouça melhor a conversa telefônica.

Pressione o botão de abaixar volume por cerca de 3 segundos (Streamer Pro e ConnectClip) durante a conversa para reativar os microfones do aparelho auditivo.

Para obter instruções detalhadas do usuário sobre o Streamer, consulte as Instruções de Uso.

Para obter instruções detalhadas do usuário sobre o ConnectClip, consulte as Instruções de Uso.

Para obter mais suporte ou dicas, consulte as informações em www.oticon.global/support

AVISO IMPORTANTE

Consulte as instruções do seu aparelho auditivo para detalhes sobre a funcionalidade do seu aparelho auditivo específico.

Avisos Gerais

Para sua segurança pessoal e para garantir o uso correto, você deve se familiarizar completamente com as seguintes advertências gerais antes de usar o seu adaptador de telefone. Consulte o seu fonoaudiólogo se ocorrerem operações inesperadas ou incidentes graves com o seu adaptador de telefone durante o uso ou por causa de seu uso. O seu fonoaudiólogo o ajudará a lidar com problemas e, se relevante, informar o fabricante e/ou as autoridades nacionais.

Conexão com equipamento externo

A segurança do uso do adaptador de telefone, quando conectado a equipamentos externos com um cabo de entrada auxiliar e/ou cabo USB e/ou de forma direta é determinada pela fonte de sinal externa. Quando conectado a equipamentos externos plugados a uma tomada de parede, este equipamento deve estar em conformidade com a IEC-62368-1 ou normas de segurança equivalentes.

Interferência

O adaptador de telefone foi testado exaustivamente quanto às interferências, de acordo com os mais rígidos padrões internacionais. No entanto, pode ocorrer interferência entre o adaptador de telefone e outros dispositivos. Se isso ocorrer, aumente a distância entre o adaptador de telefone e o aparelho causador da interferência.

Riscos de incêndio

A fonte de alimentação em seu adaptador de telefone não tem energia suficiente para causar um incêndio em condições normais de uso.

Uso de acessórios de terceiros

Use apenas acessórios, transdutores ou cabos fornecidos pelo fabricante. Acessórios incompatíveis podem resultar em compatibilidade eletromagnética (EMC) reduzida do seu dispositivo.

Condições de uso

Condições operacionais	Temperatura: +5°C a +40°C Umidade: 15% - 93% umidade relativa, sem condensação Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa
Condições de armazenamento e transporte	A temperatura e a umidade não devem exceder os limites abaixo por períodos longos durante o transporte e o armazenamento. Temperatura: -25°C a +70°C Umidade: 15% - 93% umidade relativa, sem condensação Pressão atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa

Garantia internacional

O seu dispositivo é coberto por uma garantia limitada internacional emitida pelo fabricante por um período de 12 meses, a contar da data de entrega. Esta garantia limitada cobre defeitos de fabricação e de materiais no próprio dispositivo, mas não acessórios como pilhas, cabos, fontes de alimentação, etc. Problemas provenientes do manuseio ou cuidado inadequado, uso excessivo, acidentes, reparos feitos por pessoas não autorizadas, exposição a condições corrosivas, dano devido a objetos estranhos entrando no dispositivo, ou ajustes incorretos NÃO são cobertos pela garantia limitada e podem anulá-la. Sob esta garantia, o fabricante escolherá, a seu exclusivo critério, reparar o dispositivo ou substituí-lo por um modelo equivalente. A garantia acima não afeta nenhum direito legal que você possa ter sob a legislação nacional aplicável governando

a venda de bens de consumo. Seu fonoaudiólogo pode ter emitido uma garantia que vá além das cláusulas desta garantia limitada. Consulte-o para mais informações.

Se precisar de assistência

Leve o seu dispositivo para o seu fonoaudiólogo, que poderá identificar os pequenos problemas e ajustes imediatamente. Seu fonoaudiólogo pode ajudá-lo a obter o serviço de garantia do fabricante. O seu fonoaudiólogo pode cobrar uma taxa pelos serviços prestados.

Informações técnicas

Nome do modelo	BS-H200
----------------	---------

O Adaptador de Telefone 2.0 contém um transmissor sem fios que usa a tecnologia de 2,4 GHz.

A energia de emissão do Adaptador de Telefone 2.0 é de, no máx., 10 dBm EIRP.

O Adaptador de Telefone 2.0 está em conformidade com padrões internacionais em relação a radiotransmissores, compatibilidade eletromagnética e exposição humana.

Este produto destina-se à conexão com a rede telefônica analógica pública e pode ser operado nos países da UE e da EFTA.

Devido ao tamanho limitado disponível no Adaptador de Telefone 2.0, as marcações de aprovação relevantes podem ser encontradas neste documento.

Informações adicionais podem ser encontradas nas:

Fichas Técnicas (TD) em www.oticon.global.

EUA e Canadá

O aparelho auditivo contém um módulo de rádio com os números de ID de certificação a seguir:

FCC ID: UXZBSH200
IC: 8191A-BSH200

Nota

O dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC e as normas RSSs de isenção de licença da Indústria do Canadá. A operação está sujeita às duas seguintes condições:

1. este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
2. este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.

Nota

Mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável para conformidade podem invalidar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este aparato digital de Classe B está em conformidade com o ICES-003 canadense.

Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, conforme a Parte 15 das regras FCC. Esses limites são projetados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento

gera, usa e pode irradiar energia de frequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações de rádio. Contudo, não há garantia de que a interferência não vá ocorrer em uma instalação particular. Se este equipamento causar interferência à recepção de rádio e televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento com uma saída em um circuito diferente daquela ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o fabricante ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O fabricante declara que este Adaptador de Telefone 2.0 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU.

Este dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.



O descarte de equipamentos eletrônicos deve ser manuseado de acordo com os regulamentos locais.



A Declaração de Conformidade é disponibilizada pelo fabricante.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.global

Complies with
IMDA Standards
DA103820

Descrição de símbolos e abreviações usados neste livreto



Avisos

O texto marcado com um símbolo de alerta deve ser lido antes de se utilizar o aparelho.



Fabricante

O aparelho é produzido pelo fabricante cujo nome e endereço encontram-se indicados ao lado do símbolo. Indica o fabricante do dispositivo médico, conforme definido nas Diretivas UE 2017/745 e 2017/746.



Marca CE

O dispositivo está em conformidade com todas os regulamentos e diretivas UE exigidos.



Resíduos eletrônicos (WEEE)

Reciclar aparelhos auditivos, acessórios e pilhas conforme as regulamentações locais. Os usuários de aparelho auditivo também podem devolver os resíduos eletrônicos para que seu fonoaudiólogo descarte-os. Equipamentos eletrônicos abrangido pela Diretiva 2012/19/UE sobre resíduos e equipamentos elétricos (WEEE).



Marca de Conformidade Regulatória (RCM)

O aparelho está em conformidade com os requisitos de segurança elétrica, da EMC e com os requisitos de espectro de rádio para dispositivos fornecidos ao mercado da Austrália e da Nova Zelândia.



Etiqueta IMDA Singapura

O dispositivo está em conformidade com as normas e especificações publicadas pela Info-Communications Media Development Authority (IMDA), e é compatível com as redes de telecomunicação pública em Singapura e não causa interferência de frequência de rádio a outras redes de comunicação de rádio autorizadas.

Descrição de símbolos adicionais usados nas etiquetas

	Manter seco Indica um aparelho médico que precisa ser protegido contra umidade.
	Símbolo de cuidado Consulte instruções de uso quanto a advertências e cuidados.
	Número do catálogo Indica o número do catálogo do fabricante, de modo que o aparelho médico possa ser identificado.
	Número de série Indica o número de série do fabricante, de modo que um aparelho médico específico possa ser identificado.
	Símbolo Japan JATE e Japan TELEC "R" indica a marca para equipamentos de rádio certificados. "T" indica que o dispositivo pode se conectar à rede telefônica.
	Entrada da fonte de alimentação Indica a taxa na qual a energia é enviada da fonte de alimentação para o seu dispositivo elétrico.
	Etiqueta ICASA África O dispositivo possui licença para ser vendido na África do Sul.
	Dispositivo Médico O dispositivo é um dispositivo médico.

Descrição de símbolos adicionais usados nas etiquetas

	Marca de Certificação da Coreia (KC) O dispositivo está em conformidade com os requisitos de segurança do produto coreano para equipamentos elétricos e eletrônicos.
	Telepermit da Nova Zelândia Indica que o dispositivo foi certificado e é adequado para conexão à rede de Telecomunicações da Nova Zelândia.

Informações Gerais

Nome Técnico do Produto:
Aparelho Auditivo

Nome Comercial do Produto:
Aparelho Auditivo Retroauricular Opn

Modelos:
miniRITE / miniRITE-T

Importado e Distribuído por:
Centro Auditivo Telex LTDA
Avenida Venezuela, 27 sala 901 - Saúde
Rio de Janeiro / RJ - Brasil
Cep: 20.081-311
Central de Atendimento: (21) 0800 0249 349
C.N.P.J./MF: 33.060.302/0001-04

Fabricado Por:
Oticon A/S
9, Kongebakken
Dk - Smørum - Dinamarca
Tel.: +45 39 27 79 00 Fax: +45 97 92 41 22

Responsável Técnica: **Isabela Papera de Carvalho**
CRFa: 11946/RJ

REG. ANVISA:
Opn 1/ Opn 2/ Opn 3: 103.560.201.03

220172BR / 2020.04.20 / v1

220172BR / 2020.04.20 / v1



oticon
life-changing **technology**